

2022
KATALOG WYROBÓW ORTOTYCZNYCH DLA DZIECI

PRODUCENT: **ERHEM**



AFO.CLASSIC AFO.NIGHT AFO.EXTRA LONG

DYSTRYBUTOR:



PRODUCENT:



AFO.CLASSIC

Rozwiązanie dla najmłodszych pacjentów
Pozwala na uzyskanie stabilizacji stawu skokowego w płaszczyźnie czołowej oraz unieruchomienie w pozycji pośredniej

AFO.NIGHT

Doleczanie po zabiegach ortopedycznych
Pozycjonowanie po urazach stawu skokowego oraz stopy
Profilaktyka deformacji

AFO.EXTRA LONG

Zaopatrzenie spoczynkowe lub nocne


Dla pacjentów siedzących, wózkowych, jako profilaktyka zniekształceń i deformacji,
Utrwalające efekty interwencji ortopedyczno chirurgicznych,
Stabilizująco-unieruchamiające podczas pionizacji.
Zaopatrzenie dynamiczne
Dla pacjentów chodzących z przewagą zgięcia podszwowego stopy oraz chodem na palcach.
Ze wzmożonym napięciem mięśniowym, spastyką.



AFO.CLASSIC

AFO.EXTRA LONG

Ortezy unieruchamiają staw skokowy w pozycji pośredniej. Blok PF, Blok DF.

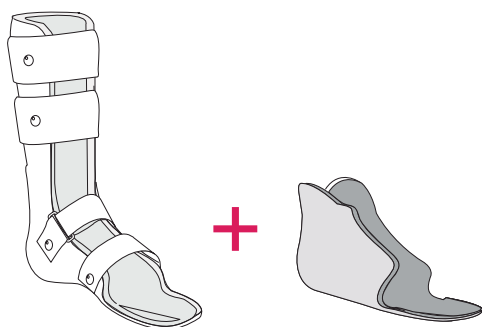

Składają się z dwóch warstw:

Warstwa wewnętrzna umożliwia korekcję ustawienia pięty oraz śródstopia.

Warstwa zewnętrzna o zróżnicowanej sprężystości zapewnia unieruchomienie oraz właściwą stabilizację podczas pionizacji lub chodu.



AFO.EXTRA LONG



WYKONYWANY INDYWIDUALNIE

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / **H.028.01**

INDYWIDUALNY

Orteza obejmująca gołeń oraz stopę.

NFZ / **H.029.01**

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

Umożliwia korekcję stawu w płaszczyźnie czołowej, jednocześnie nie ograniczając swobodnego ruchu zgięcia i wyprostu stopy. Przeznaczona jest dla młodszych pacjentów ze zmianami o charakterze znacznym.

ZASTOSOWANIE:

Koślawość na skutek obniżonego napięcia mięśniowego.
Znaczna niestabilność stawu na skutek osłabienia mięśni
Zmniejszone napięcie mięśniowe powoduje nadmierną pronację stopy.



DAFO.CLASSIC



Korekcja koślawego ustawienia kości piętowej, wsparcie kości łódkowatej oraz stabilizacja pozostałych kości stępu i śródstopia umożliwiają przywrócenie prawidłowych warunków anatomicznych stopy oraz funkcjonalny ruch w stawie.



WYKONYWANY INDYWIDUALNIE

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / **H.029.01**

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

PROSTARTER AFO.EXTRA LONG

Unieruchamia staw skokowy w pozycji pośredniej. Blok PF, Blok DF.

Stosowany jako zaopatrzenie spoczynkowe lub nocne.

W doleczeniu po zabiegach ortopedycznych

Utrwalaniu efektów terapii

Pozycjonowaniu oraz profilaktyce deformacji stawu skokowego oraz stopy

PROSTARTER DAFO.CLASSIC

Nie ogranicza swobodnego ruchu zgięcia i wyprostu w stawie skokowym.

Koryguje ustawienie stawu skokowego oraz stopy w płaszczyźnie czołowej.

Stosowany jako zaopatrzenie wspomagające chód mające na celu korekcję

Szpotałości lub koślawości wskutek obniżonego napięcia mięśniowego

Przywiedzenia przodostopia

Niestabilności stawu skokowego

Seria ortez AFO/DAFO ma na celu wstępne, szybkie oraz ekonomiczne rozwiązanie dla pacjentów ze ściśle określonymi potrzebami.

PROSTARTER

DAFO.CLASSIC
AFO.EXTRA LONG



WYKONYWANY INDYWIDUALNIE

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / **H.028.01**

INDYWIDUALNY

Orteza obejmująca gołeń oraz stopę.

NFZ / **H.029.01**

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

Przeznaczona głównie dla pacjentów chodzących. Stabilizuje stopę oraz staw skokowy bez blokowania całego ruchu, zwiększa dynamikę odbicia i wydłuża krok. Przeznaczona dla pacjentów wymagających większej dynamiki niż w przypadku ortozy AFO.

Występuje w wersji mocno sztywnej FLEX zapewniającej większą kontrolę w płaszczyźnie strzałkowej oraz bardziej elastycznej wersji EXTRA FLEX o umiarkowanej sile kontroli ułożenia stopy.

Elastyczny element wspomaga zgięcie grzbietowe stopy z zachowaniem ograniczenia zgięcia podeszwowego.

**FLEX****EXTRA FLEX****WYKONYWANY INDYWIDUALNIE**

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / H.029.01

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

DAFO.NIGHT

Przeznaczona jest dla pacjentów z ograniczeniem zakresu ruchu pochodzenia mięśniowego. Celem jej stosowania jest zwiększanie lub utrzymanie zakresu zgięcia grzbietowego z precyzyjną kontrolą stawu skokowego i stopy. Stosowania tylko jako zaopatrzenie spoczynkowe.

ZASTOSOWANIE

- N**admierne zgięcie podeszwowe stopy
- P**rzykurcz ścięgna Achillesa uniemożliwiający pionizację
- O**słabione zgięcie grzbietowe stopy na skutek porażenia lub niedowładu wiotkiego
- W**spomaga efekty terapii manualnej i farmakologicznej

Kontrola zakresu zgięcia grzbietowego i podeszwowego stopy odbywa się przez regulację długości elastycznych taśm.

**FULL MOVE**

Orteza wyposażona jest w zawiasy pozwalające na pełny, nieograniczony ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego.

**WYKONYWANY INDYWIDUALNIE**

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / H.029.01

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

Orteza umożliwia płynną kontrolę pochylenia goleni wobec stopy. Wspomaga efekty terapii manualnej i farmakologicznej. Nastawne zawiasy pozwalają na płynną regulację zakresu zgięcia podeszwowego i grzbietowego stopy. Przeznaczona do stosowania zarówno jako zaopatrzenie spoczynkowe oraz podczas chodu.



Kontrola zakresu zgięcia i wyprostu stopy odbywa się przez regulację w zawiasie stawu skokowego.

ZASTOSOWANIE

POZYCJONOWANIE

Unieruchomienie stawu skokowego w dowolnej pozycji rozpoczynając od zgięcia podeszwowego stopy (deficyt wyprostu stopy, brak pozycji pośredniej, przykurcz ścięgna Achillesa) do zgięcia grzbietowego stopy. **R**ozwiązanie przeznaczone jest dla pacjentów głównie siedzących lub leżących. Umożliwia pionizację oraz zapobiega powstawaniu deformacji na skutek wzmożonego napięcia mięśni lub spastyki.

REDRESJA

Pozwala na stopniowe dostosowanie ustawienia ortezy do możliwości pacjenta, zmian uzyskanych na skutek terapii manualnej lub farmakologicznej (terapii botulinowej) lub interwencji ortopedycznej.

CHÓD

Ogranicza zgięcie podeszwowe stopy pozostawiając pełny, nieograniczony zakres zgięcia grzbietowego.

Umożliwia zmianę ustawienia stopy względem goleni tak by korygować przeprost stawu kolanowego.

MINI SINGLE



umożliwia płynną regulację zgięcia podeszwowego PFB oraz swobodny pozostały ruch zgięcia grzbietowego.

MINI DOUBLE



umożliwia regulację zakresu ruchu zarówno zgięcia i wyprostu.



WYKONYWANY INDYWIDUALNIE

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / H.029.01

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

Orteza w zależności od zastosowanego zawiasu koryguje ustawienie stopy względem podudzia, przeciwdziała zaburzeniom osi stawu oraz umożliwia ograniczenie zgięcia podeszwowego.

Produkowane ortezy z serii AFO/DAFO wykonywane są z różnych materiałów. Zastosowane rozwiązania mają na celu uzyskanie najkorzystniejszego rezultatu w sferze korekcji ustawienia stawu skokowego oraz przodostopia, komfortu, a także ergonomii i efektywności chodu.

ZASTOSOWANI

Osłabione zgięcie grzbietowe stopy bez niestabilności kolana (WERSJA PLANTAR FLEXION BLOCK)

Wzmoczone napięcie mięśniowe powodujące zaburzenia osi stawu (WERSJA FULL MOVE)

Nadmierne zgięcie podeszwowe powoduje chód na palcach przy dobrze rozwiniętej umiejętności chodzenia (WERSJA PLANTAR FLEXION BLOCK)

Miękkie tworzywo silikonowe dobrze niweluje miejscowe przeciążenia.

Różnej grubości wypełnienia zapewniają wygodne użytkowanie, minimalizując ryzyko otarć i odgniecień

Dodatkowa stabilizacja kości piętowej przeciwdziała wyciąganiu stopy w postaciach spastycznych

Odciążenia i odbarczenia wrażliwych struktur kostnych oraz miejsc wrażliwych

Kliny tonizujące rozciągną podeszwowe

Separator palców
Korekcja ustawienia palucha

Możliwość stabilizacji i korekcji przodostopia przywiedzeniowego

Antypoślizgowa podeszwa

Wyrównania skrótów kończynowych

PLANTAR FLEXION BLOCK (PFB)
zgięcie podeszwowe ograniczone, ruch zgięcia grzbietowego zachowany.

FULL MOVE (FM)
pozwalającej na pełny, nieograniczony ruch zgięcia podeszwowego i grzbietowego.

DAFO.ACTIVE

PLANTAR FLEXION BLOCK
FULL MOVE



WYKONYWANY INDYWIDUALNIE

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej


NFZ / H.029.01

INDYWIDUALNY

Orteza krótka korygująca zaburzenia osiowe w płaszczyźnie czołowej DAFO.

HKAFO to orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy. Dostępna jest w 3 wersjach: .BASIC, .ORTHO, .NEURO.

WERSJA BASIC rekomendowana jest dla najmłodszych pacjentów. Umożliwia pionizację, zmianę środka ciężkości, trening balansu oraz reakcji nastawczych.

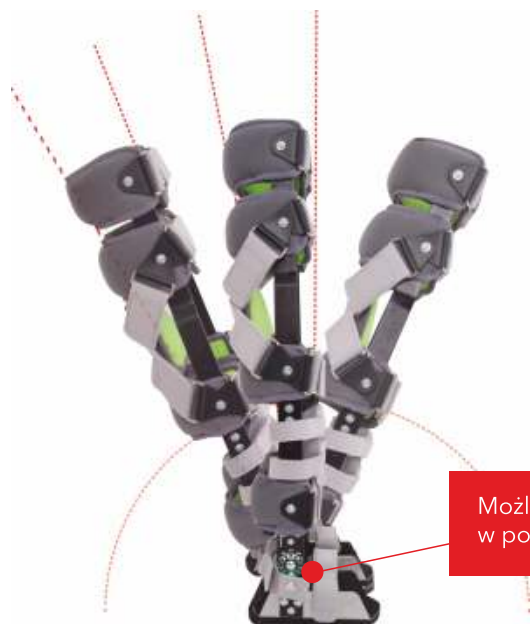

Regulacja długości szyn stawu biodrowego i skokowego.

Możliwość blokady w pozycji pośredniej.

KOLORYSTYKA



Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy HKAFOHKAFO.BASIC umożliwia stabilizację kończyn dolnych, miednicy oraz tułowia podczas pionizacji oraz nauki chodu w przebiegu:

MPDz

Przepukliny oponowo-rdzeniowej

Poliomielitis

Pourazowego uszkodzenia mózgu



HKAFO.ORTHO

WERSJA ORTHO z wykorzystaniem zawiasów 1R/15°, 1R/30° rekomendowana jest dla starszych pacjentów - głównie z ograniczeniami zakresu ruchu w stawach pochodzenia mięśniowego oraz kostnego, podwichnięciami stawu biodrowego i skrótami kończyn. Umożliwia pionizację, trening balansu oraz początki przemieszczania się.

2 WERSJE ZAWIASÓW STAWU BIODROWEGO I KOLANOWEGO

Zawiasy 1R/30° i 1R/15° przeznaczone są do wykonywania ortez dla pacjentów z powikłaniami głównie ortopedycznymi, u których występuje konieczność unieruchomienia stawu w danej pozycji oraz stopniowego zwiększania jego zakresu ruchu.

1R/30°

Umożliwia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu, regulacja co 30°.



1R/15°

Umożliwia unieruchomienie lub ograniczenie zakresu ruchu, regulacja co 15°.



Z sandałem obejmującym obuwie zwiększa płaszczyznę podparcia oraz ułatwia pionizację.

KOLORYSTYKA



Z AFO/DAFO wkładaną do obuwia umożliwia większą swobodę w nauce oraz doskonaleniu chodzenia.

Orteza obejmująca obręcz biodrową, uda, golenie i stopy HKAFOHKAFO.BASIC umożliwia stabilizację kończyn dolnych, miednicy oraz tułowia podczas pionizacji oraz nauki chodu w przebiegu:

W trybie **STAND** umożliwia w warunkach domowych wzmacnianie całej sylwetki podczas prób wstawania i pionizacji.
W trybie **WALK** wraz z opiekunem lub terapeutą pozwala na trening antygravitacyjny z wykorzystaniem elementów chodu jak kontrola miednicy, podpor obunóż, wyrok i zakrok.



Przełączanie pomiędzy trybami STAND a WALK odbywa się poprzez przekręcenie blokady.

System linek jednym pociągnięciem umożliwia równoczesne zwolnienie blokady stawu biodrowego i kolanowego.

Regulacja długości szyn stawu biodrowego oraz skokowego.

WALK

Praca ortezy w tym trybie pozwala na swobodny ruch w stawie w zakresie 30° zgięcia (0 – 30°) w stawie kolanowym oraz zgięcia i wyprost (30° – 0° – 30°) w stawie biodrowym. Szybkie zwolnienie blokady odbywa się od 30° pozwalając na płynne przejście do siadu. Pacjent w asekurowanym zakresie 30° ćwiczy samodzielny ruch zgięcia i wyprost podczas chodu, jednocześnie próbując pokonać własny ciężar w trakcie podporu obunóż oraz wyroku i zakroku.

W sytuacji zastosowania zawiasu 1 STEP LOCK w stawie kolanowym ruch odbywa się tylko w stawie biodrowym, a automatyczne zwalnianie blokady pozostaje bez zmian.



STAND (seat to stand)

Praca ortezy w tym trybie umożliwia łatwe przechodzenie z siedzenia do stania i odwrotnie. Orteza automatycznie rygluje wszystkie stawy po uzyskaniu pełnego wyprostów oraz pozwala na szybkie zwolnienie blokady i przejście do siadu. Zapewnia aktywną pionizację oraz uczestnictwo pacjenta w procesie zmiany pozycji.

2 WERSJE ZAWIASÓW + AUTOMATYCZNY SYSTEM LINEK ZWALNIAJĄCYCH



HKAFO1 STEP LOCK

z rygłem samoblokującym po uzyskaniu wyprostów

Wykorzystywany tylko dla stawu kolanowego. Przeznaczony dla pacjentów z dużą niewydolnością m. czworogłowego uda uniemożliwiającą utrzymanie wyprostów stawu kolanowego w obciążeniu.



2 STEPS LOCK

z rygłem samoblokującym po uzyskaniu wyprostów lub 30° (w zależności od trybu pracy)

Wykorzystywany dla stawu kolanowego i biodrowego. Umożliwia naprzemienną pracę w dwóch trybach STAND oraz WALK. W przypadku zastosowania w stawie kolanowym polecani pacjentom z zachowaną wyraźną pracą m. czworogłowego uda.



KOLORYSTYKA



ERH 90.COMPLETE daje możliwość pionizowania bez dodatkowych urządzeń. Przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży ze schorzeniami neurologicznymi nieuzyskujących samodzielnie pozycji stojącej, a wymagających pionizacji. Pionizator ERH 90 umożliwia mobilność w pionie, korzystnie wpłynie na drenaż dróg moczowych oraz układ krążenia, ułatwiając procesy trawienia. Pomoże także zmniejszyć przykurcze oraz zapobiegać odleżynom.

ZASTOSOWANIE

MPDz

Przepuklina oponowo-rdzeniowa

Zespoły genetyczne przebiegające z niedowładami kończyn

Urazy mózgowo-czaszkowe

Choroby demielinizacyjne

Możliwość płynnej regulacji wysokości stolika.

Regulacja wysokości, głębokości oraz szerokości podparcia stawów kolanowych umożliwia pionizację pacjenta również w przypadku przykurczu zgięciowego stawu kolanowego.


Możliwość wyboru stabilnych nóg lub kółek z hamulcem.

Pelota obejmująca miednicę oraz piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy odcinek kręgosłupa posiada elastyczny steżak umożliwiający indywidualne formowanie.

Podstawy obejmujące stopy w wersji 2D umożliwiają regulację:
-pozycji przód – tył,
-odwiedzenia – rotacji,
-szerokości obejmowanego obuwia.

Podstawy obejmujące stopy w wersji 3D oprócz regulacji:
-pozycji przód – tył,
-odwiedzenia – rotacji,
-szerokości obejmowanego obuwia, umożliwiają także płynną regulację zgięcia podszewowego stopy. Rozwiązanie dedykowane jest pacjentom z przykurczem ścięgna Achillesa.

rozmiar PIONIZATORA	S	M	L
A - ORIENTACYJNY WZROST UŻYTKOWNIKA W CM	60 - 105	82 - 150	97 - 180
B - WYSOKOŚĆ STOLIKA W CM MIN.-MAX. (min. = odległość od podłoża do zgiętego stawu łokciowego)	40 - 70	55 - 100	65 - 120
rozmiar PELOTY	S	M	L
C - OBWÓD W PASIE W CM	57 - 75	65 - 88	78 - 110

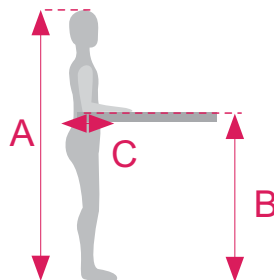

KOLORYSTYKA

oznaczenie kolorystyczne poszczególnych rozmiarów



S



M



L



Pionizator ERH 90.COMPLETE został zaprojektowany z myślą o dzieciach, które korzystają już ze wsparcia ortezy HKAFO.

Dzięki niemu dziecko może samodzielnie stać ze stabilnym podparciem bez konieczności asekuracji opiekunów. Czuje się komfortowo przy własnym stole, który może pełnić funkcję obiadową, biurka do zabawy terapii manualnej i pracy. Łatwy i szybki sposób integrowania z ortezą HKAFO zwiększa częstotliwość pionizacji pacjenta ułatwiając pełny rozwój społeczny.

Orteza ma na celu poprawę warunków statycznych oraz dynamicznych w obrębie tułowia oraz całej sylwetki. Wykonywana jest z elastycznego materiału oraz indywidualnie dobieranych elementów odciążająco - stabilizujących.

ZASTOSOWANIE

Zaburzenia neurofizjologiczne (m.p.dz., opóźnienie rozwoju psychomotorycznego)
Rozszczep kręgosłupa
Dystrofie mięśniowe
Zespół Downa
Zaburzenia integracji sensorycznej przebiegających z gwałtowną utratą równowagi oraz niepewnością grawitacyjną

DZIAŁANIE

Stabilizuje tułów i miednicę
Koryguje nadmierne przodo- lub tyłopochylenie miednicy
Protrakcję i retrakcję barków
Ułatwia elongację kręgosłupa
Wspomaga kształtowanie i rozwój prawidłowego mechanizmu odruchu postawy
Umożliwia i ułatwia rozwój reakcji równoważnych oraz obronnego podporu
Ułatwia korekcję wad postawy u dzieci ze stanami pośrednimi hipotonii posturalnej
Wspiera rozwój integracji sensomotorycznej

KANGAROO



BASIC

przeznaczona jest dla najmłodszych pacjentów, wykazujących aktywność w leżeniu oraz niskich pozycjach. Pełzanie, czworakowanie, próby siadania.



EASY

dwuczęściowa budowa pozwala na wygodny sposób jej zakładania u pacjentów z problemami dużej niestabilności, często leżących. Przeznaczony głównie do poprawy stabilizacji w siedzeniu lub podczas pionizacji.



ZIP-ZAP

z zamkiem centralnym pozwala na łatwe oraz szybkie zakładanie i zdejmowanie ortezy. Zapięcie w kroku ułatwienia wykonywanie codziennych czynności toaletowych.



PANTS

z nogawkami oraz zamkiem centralnym stworzona dla pacjentów chodzących. Orteza obejmując całą miednicę oraz uda wspomaga pracę mięśni pośladkowych, a poprzez to również jej ustawienie.

ODCIĄŻENIE



STABILIZACJA



Orteza Kangaroo wykonywana jest na podstawie miar. W zależności od indywidualnych wskazań występuje w różnej formie bazowej (body), do której dopinane są elementy stabilizujące lub korygujące.

Elementy te przybierają formę elastycznych taśm, stelaży grzbietowych lub anatomicznie wyprofilowanych pelot, które w zależności od przebiegu mogą wspomagać działanie wyprostne lub zgięciowe.

Dziecięcy gorset doniczkowy piersiowo-lędźwiowo-krzyżowy

Stabilizuje miednicę oraz tułów pacjentów ze skoliozą neurogeną. Przeznaczony jest do stosowania podczas pionizacji, siedzenia oraz lokomocji w wózku lub samochodzie. Szczególnie polecany dla pacjentów z dużą wagą oraz deformacjami.

ZASTOSOWANIE

Obniżone napięcie mięśniowe, porażenia i niedowłady utrudniające utrzymanie właściwej pozycji siedzącej oraz wtórnie prowadzące do bocznych skrzywień kręgosłupa w przebiegu:
Dystrofii mięśniowej
Przepukliny oponowo-rdzeniowej
MPDz
Skoliozy porażennej

DZIAŁANIE

Poprawa stabilności w siedzeniu oraz pionizacji, która pozwala na lepszą kontrolę głowy i większą funkcjonalność kończyn górnych
Zwiększenie sprawności oddechowej w skorygowanej pozycji siedzącej
Umożliwia stabilizację miednicy oraz tułowia

Celem stosowania gorsetu ERH 48/3 STRONG STIFF jest:

Przeciwdziałanie deformacji układu kostno-stawowego
Współdziałanie przy normalizacji napięcia mięśniowego
Zapewnienie pionizacji
Ułatwienie/umożliwienie lokomocji
Poprawa postawy w wyproście oraz podczas siedzenia
Ułatwienie/umożliwienie wykonywania czynności życia codziennego
Utrwalenie osiągniętych postępów terapeutycznych



ORTEZA SKŁADA SIĘ Z DWÓCH CZĘŚCI, KTÓRE W OKREŚLONYCH SYTUACJACH DAJĄ MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA ICH NIEZALEŻNIE LUB W CAŁOŚCI.

1. CZĘŚĆ WEWNĘTRZNA ODCIĄŻAJĄCO - STABILIZUJĄCA

Wykonana jest z elastycznego materiału z metalowymi usztywnieniami wspomagającymi utrzymać właściwą pozycję.

Działanie kompresyjne materiału połączone ze stabilizacją dodatkowymi elementami ma za zadanie zwiększenie ciśnienia w jamie brzusznej, zmniejszając w ten sposób wagę obciążeniową na wrażliwe struktury kręgosłupa, jak kręgi i stawy.

Zmniejszając obciążenie tych struktur gorset ma za zadanie zmniejszyć asymetrię ułożeniową i złagodzić ból pleców oraz napięcie mięśniowe.

Część wewnętrzna przeznaczona jest do używania głównie w leżeniu lub w siedzeniu z dodatkowym podparem pod plecy u pacjentów z mniej zaawansowanymi skoliozami.

STABILIZACJA I ODCIĄŻENIE




2. CZĘŚĆ ZEWNĘTRZNA KORYGUJĄCO - UNIERUCHAMIAJĄCA

Wykonana jest z tworzywa i zakładana bezpośrednio na część wewnętrzną.

Składa się z dwóch anatomicznie wyprofilowanych połówek obejmujących miednicę i tułów głównie w części bocznej i tylnej.

Część zewnętrzna stosowana jest tylko z wcześniej założoną częścią wewnętrzną.

KOREKCJA I UNIERUCHOMIENIE

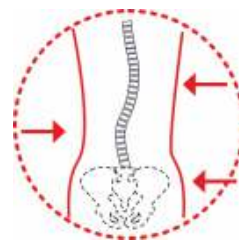

Skorzystaj z indywidualnej karty pomiarowej

NFZ / **Ł.055.01**

INDYWIDUALNY

Gorset korygujący do leczenia skolioz.

ERH48/3.MEDIUM STIFF

Gorset wykonany jest z elastycznego materiału z metalowymi usztywnieniami wspomagającymi utrzymanie właściwej pozycji oraz odciążenie kręgosłupa.

Właściwości kompresyjne materiału połączone ze stabilizacją dodatkowymi elementami zwiększają ciśnienie w jamie brzusznej, odciażając wrażliwe struktury kręgosłupa, jak kręgi i stawy. Prowadzi to do zmniejszenia asymetrii ułożeniowej oraz łagodzi ból pleców i niweluje napięcie mięśniowe.

CELE STOSOWANIA GORSETU:

Przeciwdziałanie deformacji układu kostno-stawowego
Współdziałanie przy normalizacji napięcia mięśniowego
Ułatwienie/umożliwienie pionizacji oraz lokomocji
Poprawa postawy podczas siedzenia



ROZMIAR	S	M	L	XL
OBWÓD PASA W CM	40-50	45-60	55-70	65-80
WYS. GORSETU W LINII BOCZNEJ W CM	15	20	25	30

OPCJA WYSOKOŚCI GORSETU

DOSTĘPNA JEST DO WYBORU DLA KAŻDEGO ROZMIARU OBWODU

W przypadku braku odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarowej skorzystaj z INDYWIDUALNEJ KARTY POMIAROWEJ.



NFZ / **Ł.054.01**

INDYWIDUALNY

Gorset odciażająco-stabilizujący.

NFZ / **M.059.01**

Orteza tułowiowa sztywna wysoka ze stawkami lub fiszbinami.

Seria ortez przeznaczona dla dzieci, u których w przebiegu schorzeń neurologicznych występują trudności z funkcjonalnym ustawieniem nadgarstka oraz kciuka.

ZASTOSOWANIE

Wzmoczone napięcie mięśniowe powodujące zgięciowe i przywiedzeniowe ustawienie nadgarstka oraz kciuka.

DZIAŁANIE

Właściwe ustawienie nadgarstka oraz kciuka stopniowo przywraca funkcjonalność ręki oraz przeciwdziała negatywnym następstwom wynikającym z niewłaściwej pozycji.



Odwodzi kłęb kciuka oraz kciuk. Stabilizuje staw nadgarstkowy w optymalnym położeniu.

Stabilizacja stawu nadgarstkowego uzyskiwana jest wyprofilowaną stałką ortopedyczną z możliwością jej indywidualnego formowania.



ERH 38 / 4A

ERH 38 / 4B



Dodatkowe ujęcie palców, umożliwia ich wyprost przy zachowaniu funkcji chwytnej.

ROZMIAR	S	M	L
OBWÓD ŚRÓDRĘCZA	DO 12	12-14	14-16
WERSJA NA PRAWĄ LUB LEWĄ DŁOŃ			

W przypadku braku odpowiedniego rozmiaru w tabeli rozmiarowej skorzystaj z INDYWIDUALNEJ KARTY POMIAROWEJ.



NFZ / K.045.01

INDYWIDUALNY

Orteza na rękę i przedramię.

NFZ / L.048.01

Orteza na rękę i przedramię.



MyWam Polska Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 10


41-516 Chorzów

tel +48 534 899 377

biuro@mywam.pl

NIP: 6272771861

KONTAKT W REGIONACH

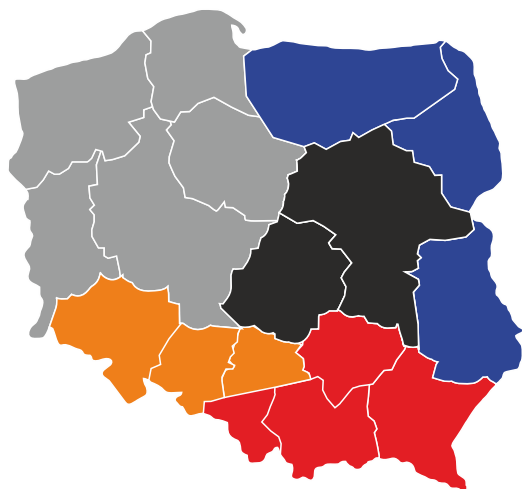

kom.: +48 531 790 664

województwa:

Zachodniopomorskie, Pomorskie,
Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 535 555 694

województwa:

Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813

województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie.

kom.: +48 798 026 502

województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 297

województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.