



Zdjęcie poglądowe



MeWa

Instrukcja obsługi i konserwacji

Edycja 9 / 2023-06-23

Wózek inwalidzki specjalny MEWA

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Użytkownik z niesprawnością widzenia, czytania lub niesprawnością poznawczą proszony jest o zgłoszenie się do Producenta.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obsługi i konserwacji zawiera podstawowe informacje niezbędne dla prawidłowego użytkowania wózka inwalidzkiego Mewa, w tym zasady bezpieczeństwa jego użytkowania, opis jego budowy, obsługi i regulacji, przygotowania wózka do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia wózka oraz warunków gwarancji.

Przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (asystentów dziecka - rodziców, opiekunów), które będą przewożone w wózku. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących wózek.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią produktu i każdorazowo musi być dołączona do sprzedawanego produktu. **Zachowaj niniejszą instrukcję na przyszłość!** Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu. Instrukcja w wersji elektronicznej znajduje się na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z obecnością wózka inwalidzkiego Mewa, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.pl



Wersja Instrukcji obsługi i konserwacji: PL **Edycja 9 / 2023-06-23**

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji obsługi i konserwacji bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji.

UWAGA! Zdjęcia zawarte w Instrukcji użytkowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

Spis treści

▪ Wprowadzenie	5
1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wózka Mewa	5
2. Podstawowe informacje o wózku Mewa	5
3. Szybki start	6
▪ Bezpieczeństwo	7
4. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa	7
5. Tabliczki	8
5.1. Tabliczka znamionowa	8
5.2. Tabliczka z kodem UDI	8
6. Tablice ostrzegawcze	8
7. Oznaczenie symboli	8
▪ Produkt	9
8. Ogólna budowa wózka	9
9. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka	10
9.1. Mechanizm składania ramy	10
9.2. Rozkładanie ramy wózka. Blokada transportowa.	10
9.3. Składanie ramy	10
9.4. Przednie koła skrętne, pełne. Montaż i demontaż. Blokada kierunku jazdy	11
9.5. Tylnie koła, pełne. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę	11
9.6. System amortyzacji tylnych kół	12
9.7. Ergonomiczna rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowna rączki	12
9.8. Hamulec centralny. Załączanie i wyłączenie hamulca	13
9.9. Stopka przechyłowa	13
9.10. Uchwyt do przenoszenia	13
9.11. Podnózek. Regulacja i użytkowanie	13
10. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy	14
10.1. Montaż i demontaż siedziska do ramy	14
10.2. Regulowane siedzisko, tzw. "kołyska"	14
10.3. Regulowane oparcie	15
11. Wyposażenie podstawowe	15
11.1. Pasy pięciopunktowe	15
11.2. Bariarka zabezpieczająca	16
11.3. Regulowana budka z okienkiem	16
11.4. Kosz na zakupy	17
11.5. Pasy odwodząco-stabilizujące	17
11.6. Klin	17
11.7. Wkładki wyścielające	17
11.8. Tapicerka	17
12. Wyposażenie dodatkowe	18
12.1. Peloty zagłówek z regulacją ↔ oraz ↕	18
12.2. Peloty piersiowo-lędźwiowe z regulacją ↔ oraz ↕	18
12.3. Stolik terapeutyczny	18
12.4. Wkładki zwężająco-spycające	19

12.5.	Torba turystyczna	19
12.6.	Parasolka przeciwsłoneczna	19
12.7.	Rękawice zimowe	19
12.8.	Śpiwór na nogi	20
12.9.	Moskitiera	20
12.10.	Folia przeciwdeszczowa	20
13.	Specyfikacja techniczna wózka Mewa	21
13.1.	Skład surowcowy wózka	21
14.	Dostawa i narzędzia	21
15.	Montaż i demontaż wózka	22
16.	Przygotowanie do użytkowania	23
17.	Użytkowanie wózka	23
17.1.	Przenoszenie wózka	23
17.2.	Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego	24
17.3.	Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim	24
17.4.	Jazda na wózku inwalidzkim	24
17.5.	Poruszanie się po powierzchniach pochyłych	24
17.6.	Pokonywanie progów lub krawężników	25
17.7.	Transport w samochodzie i w innych pojazdach	25
17.8.	Czyszczenie i pielęgnacja	25
18.	Przechowywanie wózka	26
18.1.	Przygotowanie wózka do długotrwałego przechowywania	26
18.2.	Zabezpieczenie antykorozyjne	26
19.	Powtórne użycie	27
20.	Serwis i przeglądy okresowe	27
21.	Utylizacja	28
22.	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych	28
23.	Notatki	29
24.	Lista autoryzowanych punktów serwisowych	30
25.	Karta Gwarancyjna	31

▪ Wprowadzenie

Dziękujemy Państwu za zakup specjalnego wózka **Mewa**. Mamy nadzieję, że będzie on okazją do wielu wspólnych chwil z Waszym dzieckiem i będzie pomocny każdego dnia. Dokładamy wszelkich starań by nasze produkty spełniały Wasze oczekiwania i najwyższe standardy. Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami oraz śledzenia nas na naszej stronie internetowej www.mywam.eu oraz w mediach społecznościowych. Możecie się tam dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy o naszych produktach.

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wózka Mewa

„Mewa” to zaprojektowany z myślą o dzieciach niepełnosprawnych wielofunkcyjny inwalidzki wózek spacerowy. Wózek oparty jest na ramie wykonanej z elementów aluminiowych oraz stalowych. Umożliwia szybki demontaż kół. „Mewa” jest kompletnym systemem terapeutycznym umożliwiającym regulację kąta oparcia i podnóżka, długość podnóżka, pozycję zagłówka itp. Wyrób wyposażony jest w szereg akcesoriów poprawiających funkcjonalność i komfort użytkowania, takich jak np.: stolik, pasy zabezpieczające, klin, budka, moskitiera, śpiwór torba na zakupy itp. Użytkownicy nie mogą jeździć wózkiem samodzielnie, a jedynie z pomocą opiekuna. Wózek może być użytkowany wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, na różnych nawierzchniach (asfalt, beton, kamień, żwir) i w różnych warunkach pogodowych. Inne niż opisane stosowanie wyrobu jest zakazane. Wózek musi być używany wraz z instrukcją użytkowania, wyłącznie przez osoby dorosłe opiekujące się użytkownikiem. Młodzież i dzieci jak również wszelkie inne osoby bez odpowiedniego przeszkolenia nie powinny używać wyrobu.

Wózek inwalidzki specjalny "Mewa" jest wyrobem medycznym klasy I wskazanym do używania przez te dzieci niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić stać lub siadać. Wyrób przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej lub leżącej oraz na korekcji postawy i na tym polega jego przewidziane zastosowanie. Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponoworzeniowa, dystrofie, niedowłady itp. Wyrób przewidziany jest dla użytkowników w wieku od 3 do 10 lat, o wzroście 90-125 cm oraz wadze do 40 kg. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

Przeciwwskazania:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

2. Podstawowe informacje o wózku Mewa

Wózek inwalidzki Mewa posiada wiele możliwości regulacyjnych, np.:

- regulacja kąta pochylecia oparcia (patrz pkt 10.3)
- regulacji kąta siedziska-tzw. „Kotyska” (patrz pkt 10.2)
- regulacji głębokości siedziska- wkładki (patrz pkt 12.4)
- regulacji podnóżka (patrz pkt 9.11)
- regulacja pelot (patrz pkt 12.1 i 12.2)
- wyposażenie dodatkowe (patrz pkt 12)

3. Szybki start

Aby szybko użytkować wózek należy go rozpakować i przygotować do użytkowania wg pkt 15 Montaż i demontaż wózka oraz pkt 16 Przygotowanie do użytkowania. Poniżej wskazano poglądowy schemat, ale nie zastąpi on uważnego przeczytania kompletnej instrukcji.



▪ Bezpieczeństwo

4. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa

- Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego wózek nie jest przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez dziecko!
- Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.
- Zabrania się umieszczania na wózku dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie wózka inwalidzkiego Mewa i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka Mewa nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia. Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do wózka wpływają na jego stabilność.
- **UWAGA!** W zależności od wykonanych regulacji wózka inwalidzkiego Mewa - dotyczy ustawienia rączki do pchania wózka, regulacji wysokości oparcia, regulacji kątowej oparcia, regulacji głębokości siedziska, regulacji kątowej siedziska, regulacji kąta podnóżka oraz ustawienia podnóżka - to wózek ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- **UWAGA!** Przed każdorazowym użyciem wózka należy wykonać rozpisane poniżej czynności, a w przypadku nieprawidłowości nie wolno używać wózka. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.
- **UWAGA!** Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy wózka, należy upewnić się, czy po obu stronach wózka jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wózka.
- **UWAGA!** Temperatura wózka może wzrosnąć, gdy wózek jest wystawiony na działanie promieni słonecznych.

OSTRZEŻENIE!



- Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w wózku, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem!
- Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na tyżwach czy rołkach.
- Wózek nie jest przeznaczony jako siedzisko w pojeździe silnikowym.
- Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
- Nie przenosić wózka z dzieckiem.
- Wózek zapakowany jest w worek. Worek nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci. Nie nakładać na głowę. Niebezpieczeństwo uduszenia.

-
- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania wózka, jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą i/lub Producentem w celu otrzymania porady.

5. Tabliczki

5.1. Tabliczka znamionowa

- Na tabliczce znamionowej znajdują się podstawowe informacje o produkcie: nazwa, model, numer seryjny (identyfikacyjny), maksymalne obciążenie, data produkcji, potwierdzenie o zgodności produktu dla wyrobów medycznych, ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji, że jest to wyrób medyczny oraz dane producenta (patrz Zdj. 5.1).
- Tabliczka znamionowa znajduje się na belce poprzecznej z tyłu ramy wózka, po jej lewej stronie, przyklejona od góry.



Zdj. 5.1

5.2. Tabliczka z kodem UDI


Tabliczka z kodem UDI zawiera informację o produkcie: nazwa, model, kod UDI oraz dane producenta (Zdj. 5.2).



Zdj. 5.2

6. Tablice ostrzegawcze

- Na tabliczce ostrzegawczej znajdują się ważne ostrzeżenia dla użytkownika (patrz Zdj. 6.1).
- Tabliczka ostrzegawcza znajduje się na tylnej / bocznej części ramy, po obu stronach.

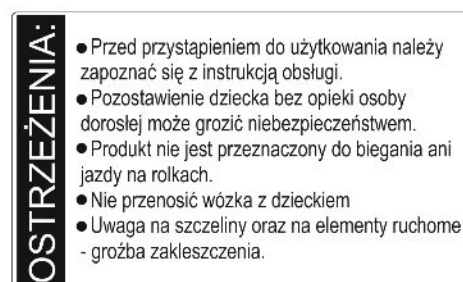

Zdj. 6.1

7. Oznaczenie symboli

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji produktu		

■ **Produkt**

8. Ogólna budowa wózka

Wózek Inwalidzki Specjalny Mewa składa się z dwóch głównych części: ramy wózka z siedziskiem i oparciem, podnóżkiem oraz bardzo bogatym wyposażeniem dodatkowym, które należy dobrać według indywidualnych potrzeb użytkowników.

• **Wyposażenie standardowe**

Do standardowego wyposażenia wózka mogą należeć:



- | | | |
|-----|--|------------------|
| 1- | Regulowana budka | - patrz 11.3 |
| 2- | Ergonomiczna rączka do pchania wózka- | patrz 9.7 |
| 3- | Pasy pięciopunktowe | - patrz 11.1 |
| 4- | Mechanizm regulacji oparcia i siedziska- | patrz pkt 10.2 |
| 5- | Blokada transportowa | - patrz pkt 9.2 |
| 6- | Regulowany podnóżek z pasami | - patrz pkt 9.11 |
| 7- | Tylne koła, pełne | - patrz pkt 9.5 |
| 8- | Blokada kierunku jazdy przednich kół | - patrz pkt 9.4 |
| 9- | Przednie koła skrętne, pełne | - patrz pkt 9.4 |
| 10- | Barierka zabezpieczająca | - patrz pkt 11.2 |
| 11- | * Klin | - patrz pkt 11.6 |
| 12- | Tapicerka oparcia i siedziska | - patrz pkt 17.8 |
| 13- | * Pasy odwodząco-stabilizujące | - patrz pkt 11.5 |
| 14- | Hamulec centralny | - patrz pkt 9.8 |
| 15- | Stopka przechyłowa | - patrz pkt 9.9 |
| 16- | System amortyzacji tylnych kół | - patrz pkt 9.6 |
| 17- | Poduszki wyścielające | - patrz pkt 11.7 |
- *) opcja

• **Wyposażenie dodatkowe**

Do jego elementów mogą należeć (opcje):

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| ○ | Stolik terapeutyczny | - patrz pkt 12.3 |
| ○ | Wkładki zwężająco-splątujące | - patrz pkt 12.4 |
| ○ | Peloty | - patrz pkt 12.1&12.2 |
| ○ | Torba turystyczna | - patrz pkt 12.5 |
| ○ | Kosz na zakupy | - patrz pkt 11.4 |
| ○ | Folia przeciwdeszczowa | - patrz pkt 12.10 |
| ○ | Rękawice zimowe | - patrz pkt 12.7 |
| ○ | Śpiwór na nogi | - patrz pkt 12.8 |
| ○ | Moskitiera | - patrz pkt 12.9 |
| ○ | Parasolka przeciwsłoneczna | - patrz pkt 12.6 |



9. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka

9.1. Mechanizm składania ramy

Mechanizm składania ramy znajduje się wewnątrz ramy oraz na ramie w dwóch miejscach w jej prawej części i w trzech miejscach w jej lewej części. Patrz zdj. 9.1. Opisując te miejsca od góry, od strony rączki do pchania wózka, są to:


- łamaniec prawy i lewy - element umożliwiający złożenie górnej części ramy w celu zmniejszenia jej wymiarów
- mechanizm składania ramy wraz z blokadą



Zdj. 9.1.

Punkty składania ramy

9.2. Rozkładanie ramy wózka. Blokada transportowa.

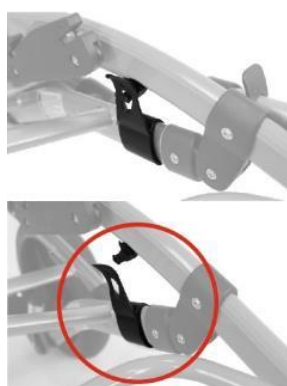

Zdj. 9.2.1

Blokada transportowa



Zdj. 9.2.2

Rozkładanie ramy

W celu rozłożenia (otwarcia) ramy wózka: ułóż ramę wózka poziomo na podłożu i ściągnij blokadę transportową (Zdj. 9.2.1) Następnie pociągnij delikatnie oparcie do pozycji pionowej (Zdj. 9.2.2.). Aby ustawić wózek należy pociągnąć ostrożnie rączkę podnosząc ją delikatnie w górę jednocześnie ustawiając wózek w pozycji zbliżonej do pożądaney aż do momentu zaskoczenia blokady składania ramy. Rama wózka będzie prawidłowo rozłożona dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo zamknięty mechanizm składania ramy. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik",

pochodzący z dobrze zamkniętego mechanizmu składania ramy.

9.3. Składanie ramy

W celu złożenia ramy wózka: naciśnij czerwony przycisk (Zdj. 9.3.1) znajdujący się w górnej części mechanizmu składania ramy i równocześnie pociągnij do góry oba uchwyty (Zdj. 9.3.2) znajdujące się w górnej części mechanizmu składania ramy. Następnie złóż ramę wózka i załóż blokadę transportową.



Zdj. 9.3.1

Czerwony przycisk



Zdj. 9.3.2

Mechanizm składania

9.4. Przednie koła skrętne, pełne. Montaż i demontaż. Blokada kierunku jazdy

Zastosowane, wytrzymałe koła gwarantują najwyższą jakość prowadzenia wózka, przyjemność z jazdy i elegancki wygląd. Opony są bezdętkowe, wypełnione specjalnym żelem, który ma właściwości amortyzacyjne bardzo zbliżone do kół pompowanych. Koła są fabrycznie zamontowane w widelcach kół przednich, które od góry zakończone są ośkami skrętu.

Oba koła przednie można ustawić do jazdy na wprost lub odblokować je do skręcania, co znacznie ułatwia manewrowanie wózkiem. Dzięki blokadzie kierunku jazdy przednich kół i możliwości jej zakładania lub ściągania, podczas prowadzenia wózka odczuwalny jest wyraźnie większy komfort zarówno dla dziecka jak i asystenta.

Zaleca się ściągnięcie blokady i umożliwienie skręcania przednich kół podczas prowadzenia wózka po zupełnie gładkiej powierzchni jak np. w centrach handlowych, szkole.

- **Montaż.** Nałóż oba przednie koła. W tym celu załóż oś skrętu koła w otwór systemu szybkiego demontażu, aż do kliknięcia. O prawidłowym założeniu koła świadczy wyraźny dźwięk

"klik", pochodzący z systemu szybkiego demontażu przednich kół. W celu ściągnięcia kół należy nacisnąć przycisk systemu szybkiego demontażu i ściągnąć koło. Patrz Zdj.. 9.4.1

- **Blokada kierunkowa.** W przypadku nierównej nawierzchni, poruszaniu się po powierzchniach pochyłych, podczas pokonywania progów lub krawężników, zaleca się założenie blokady i zablokowanie skręcania przednich kół. W celu zablokowania skręcania przednich kół należy przekręcić pokrętło aż do zaskoczenia

blokady – patrz Zdj. 9.4.2.



Zdj. 9.4.1

*Przycisk systemu
szybkiego demontażu*



Zdj. 9.4.2

Pokrętło blokady skręcania

9.5. Tyłne koła, pełne. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę

Zastosowane, wytrzymałe koła gwarantują najwyższą jakość prowadzenia wózka, przyjemność z jazdy i elegancki wygląd. Opony są bezdętkowe, wypełnione specjalnym żelem, który ma właściwości amortyzacyjne bardzo zbliżone do kół pompowanych.

Dzięki możliwości zdemontowania zarówno kół jak ich osi, wózek jest mniejszy po złożeniu co ułatwia jego transport i przechowywanie.

Mechanizm montażu kół zamontowany jest wewnątrz tylnych kół i zapewnia szybki montaż i demontaż kół tylnych. Uruchamia się go poprzez naciśnięcie klamry szybkiego montażu (Zdj. 9.5.1.), w kierunku do środka koła, po czym można założyć koło tylne na ośkę koła tylnego lub ściągnąć koło tylne z osi koła tylnego.



Zdj. 9.5.1

Klamra szybkiego montażu

- Montaż kół na ośkę

Podczas zakładania tylnego koła na ośkę koła tylnego, należy wcisnąć klamrę znajdującą się na środku koła i nałożyć koło na początek jego ośki. Następnie należy przestać naciskać na klamrę i kontynuować wsuwanie koła na jego ośkę, aż do kliknięcia. O prawidłowym założeniu koła świadczy wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z mechanizmu szybkiego montażu tylnych kół na ośkę.

- Demontaż kół z ośki


W celu demontażu tylnego koła z ośki tylnego koła, należy wcisnąć klamrę znajdującą się na środku koła i wysunąć koło z jego ośki. – Zdj. 9.5.2.



Zdj. 9.5.2
Demontaż koła

9.6. System amortyzacji tylnych kół

Wózek wyposażony jest w sprężynową amortyzację ramy i tylnych kół, znajdującą się na końcach tylnych nóg ramy, przy styku z belką poprzeczną. Amortyzacja działa automatycznie. Regulacja następuje poprzez uruchomienie dźwigni góra - dół zlokalizowanej od dołu amortyzatora – patrz Zdj. 9.6. W celu usprawnienia przełączenia ustawień dźwignią dopuszcza się jednoczesny nacisk na sprężynę amortyzatora. Pod wpływem przełączenia dźwigni sprężyna amortyzatora zostanie ściśnięta (opcja dla twardego podłoża) lub rozciągnięta (miękkie podłoże).

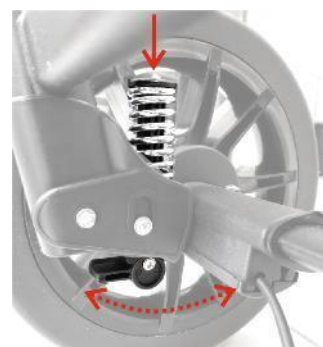

Zdj. 9.6
Amortyzator z regulacją

9.7. Ergonomiczna rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowa rączki.

Rączka do pchania wózka zapewnia pewny uchwyt w różnych warunkach jazdy. Posiada możliwość regulacji służącej do dopasowania wysokości uchwytu dla asystenta dziecka, który prowadzi wózek – Zdj. 9.7



Zdj. 9.7

Mechanizm regulacji kątowej rączki

•Mechanizm regulacji.

Są to dwa przyciski po zewnętrznej stronie ramy, umieszczone na przegubach rączki do pchania wózka.

•Regulacja kątowa rączki do pchania wózka

W celu zmiany kąta pochylenia rączki do pchania wózka należy nacisnąć jednocześnie oba przyciski mechanizmu regulacji kątowej rączki do pchania i zmienić jej kąt pochylenia. Po ustawieniu rączki w odpowiedniej pozycji, należy przestać naciskać na przyciski, co spowoduje automatyczne zablokowanie rączki do pchania w żądanej pozycji.

9.8. Hamulec centralny. Załączanie i wyłączanie hamulca

Pedał hamulca centralnego (Zdj. 9.8), którego naciśnięcie blokuje bezpośrednio oba tylne koła wózka, znajduje się pośrodku belki poprzecznej, z tyłu ramy wózka.

- Załączanie i wyłączanie hamulca centralnego**

W celu załączenia hamulca centralnego należy nacisnąć pedał hamulca w dół, w kierunku do podłoża, aż do kliknięcia. O prawidłowym załączeniu hamulca świadczy wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z hamulca centralnego.

W celu wyłączenia hamulca centralnego należy pociągnąć pedał hamulca do góry.



Zdj. 9.8
Hamulec centralny

9.9. Stopka przechyłowa

Stopka przechyłowa (Zdj. 9.9) znajduje się po prawej stronie belki poprzecznej, z tyłu ramy wózka. W celu jej użycia należy nacisnąć stopkę przechyłową i jednocześnie pociągnąć do siebie rączkę do pchania wózka, co z kolei spowoduje podniesienia się do góry przedniej części wózka wraz z przednimi kołami.

Używanie stopki przechyłowej ułatwia wjazd wózka na niewielkie progi lub krawężniki.



Zdj. 9.9
Stopka przechyłowa

9.10. Uchwyt do przenoszenia

Uchwyt do przenoszenia ramy wózka znajduje się między mocowaniami kosza na zakupy. (Zdjęcie 9.10)



Zdj. 9.10
Uchwyt do przenoszenia

9.11. Podnóżek. Regulacja i użytkowanie.



Zdj. 9.11
Regulacja podnóżka

Regulowany podnóżek należy do standardowego wyposażenia wózka inwalidzkiego Mewa.

- Regulacja wysokości podnóżka. W celu zmiany wysokość podnóżka należy śrubokrętem typu krzyżak wykręcić śruby (zdej. 9.11), następnie ustawić podnóżek na odpowiedniej wysokości i skrócić podnóżek śrubami.
- Mechanizm regulacji kątowej całego podnóżka. W celu zmiany pochylenia podnóżka, należy wcisnąć przyciski zaznaczone na zdjęciu po obydwóch stronach podnóżka, następnie ustawić odpowiednią pozycję i zwolnić przyciski.
- Użytkowanie podnóżka. Zaleca się ustawić płytę podnóżka na takiej wysokości, żeby stopy dziecka mogły się na niej swobodnie oprzeć całą swoją powierzchnią, a jednocześnie uda dziecka były położone równolegle do

płaszczyzny siedziska. W płycie podnóżka znajdują się taśmy mocujące stopy dziecka. Zaleca się ich zakładanie podczas użytkowania wózka.

Standardowo płyta podnóżka znajduje się w położeniu poziomym. Jednak w czasie transportu, przechowywania, rehabilitacji, wsiadania i wysiadania z wózka inwalidzkiego Mewa, płyta podnóżka musi być złożona i obrócona w kierunku stelaża podnóżka.

10. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy

10.1. Montaż i demontaż siedziska do ramy

Dwa zaczepy ramy do siedziska są bardzo ważnymi elementami budowy wózka. Służą połączeniu siedziska wózka do ramy wózka. Prawidłowe użytkowanie zaczepów ramy jest ważne dla bezpieczeństwa dziecka i innych osób. Zawsze zwracaj szczególną uwagę na brak pęknięć, uszkodzeń zaczepów ramy oraz jej prawidłowe działanie. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń nie używaj wózka, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka i innych osób!

- **Montaż siedziska.** Siedzisko można zamontować przodem lub tyłem do kierunku jazdy. W celu zamontowania siedziska, nałóż siedzisko w zaczepy ramy. Dociśnij siedzisko, aż do dwóch kliknięć. O prawidłowym założeniu siedziska świadczą wyraźne dźwięki "klik", pochodzące z obu zaczepów ramy. Patrz Zdj. 10.1.1.



Zdj. 10.1.11
Zaczepy siedziska do ramy



Zdj. 10.1.2
Przycisk zwolnienia

- **Demontaż siedziska.**

W celu zdemontowania siedziska, należy wcisnąć w dół, w kierunku podłoża, po obu stronach wózka czerwone przyciski, znajdujące się u spodu obu zaczepów ramy (Zdj. 10.1.2). Następnie wysunąć siedzisko z zaczepów ramy.

10.2. Regulowane siedzisko, tzw. "kołyska"

Wózek wyposażony jest w siedzisko, które można ustawić w 4 różnych pozycjach pochylenia (kołyska). W celu zmiany pochylenia siedziska należy pociągnąć w tył stalowy uchwyt umieszczony z tyłu siedziska i powoli zmieniać pochylenie siedziska. Po ustawianiu siedziska w pożądaną pozycję należy puścić uchwyt.

UWAGA! Każda zmiana pochylenia siedziska powoduje zmianę ogólnego środka ciężkości. Ma to wpływ na stabilność wózka.

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!



Zdj. 10.2
Regulacja siedziska

10.3. Regulowane oparcie

Wózek wyposażony jest w oparcie, które można ustawić w różnych pozycjach pochylenia: od pozycji siedzącej do pozycji leżącej. W celu zmiany pochylenia oparcia wpierw należy je odciążyć, poprzez nieznaczne przesunięcie całego oparcia w kierunku pozycji bardziej siedzącej. Następnie należy pociągnąć do góry uchwyt umieszczony z tyłu oparcia i powoli zmienić pochylenie oparcia. Po ustawieniu oparcia w odpowiedniej pozycji, należy opuścić w dół uchwyt umieszczony z tyłu oparcia. **UWAGA! Każdorazowa zmiana pochylenia oparcia wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych! Regulacje należy wykonywać z włączonym hamulcem.**



Zdj. 10.3

Regulacja kąta oparcia

UWAGA! Wszelkie regulacje wózka i jego elementów należy wykonywać BEZ DZIECKA umieszczonego w wózku! Niestosowanie się do powyższych ostrzeżeń grozi poważnym niebezpieczeństwem dla użytkującego dziecka!

11. Wyposażenie podstawowe

11.1. Pasy pięciopunktowe

Wózek inwalidzki Mewa jest standardowo wyposażony w profesjonalne, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa

- Regulacja pasów pięciopunktowych. Przed założeniem dziecku pasów pięciopunktowych należy je wyregulować. W celu regulacji długości pasów należy przesunąć regulatory na szelkach w górę lub w dół i odpowiednio przesunąć ochraniacze. W celu regulacji wysokości zamocowania pasów do oparcia na plecy, należy przełożyć mocowanie szelk z mocowania niskiego na mocowanie wysokie lub odwrotnie.

- Użytkowanie. W celu założenia dziecku pasów pięciopunktowych, należy założyć dziecku szelki z prawej i lewej strony a następnie wpiąć obie szelki w klamrę do zapinania pasów, która zamocowana jest na siedzisku. W celu ściągnięcia z dziecka pasów pięciopunktowych, należy nacisnąć przycisk na klamrze górnej (piersiowej) oraz dolnej i wypiąć obie szelki z klamry oraz powoli ściągnąć te szelki z prawej i lewej strony dziecka.



Zdj. 11.1.

Pasy pięciopunktowe

Uwaga! Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.

11.2. **Barierka zabezpieczająca**

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w barierkę zabezpieczającą, która w przypadku określonych wskazań zapobiega wypadnięciu siedzącego dziecka do przodu.

- **Montaż i demontaż barierki.** Barierkę zabezpieczającą montuje się za pomocą tych samych mocowań, co stolik terapeutyczny, dlatego nie można użytkować obu tych elementów równocześnie. W celu montażu barierki zabezpieczającej należy wsunąć ją w mocowanie stolika lub barierki aż do kliknięcia.

Barierka będzie prawidłowo zamontowana dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo wsunięta w mocowanie stolika lub barierki. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze połączonego mocowania stolika lub barierki.

W celu demontażu barierki należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się przy mocowaniu stolika lub barierki oraz wysunąć barierkę.



Zdj. 11.2

Barierka zabezpieczająca

11.3. **Regulowana budka z okienkiem**

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w regulowaną budkę z okienkiem, który pomaga chronić dziecko przed słońcem lub deszczem. Elementami budki są: stelaż budki (przedni i tylny łuk), mechanizm regulacji otwierania budki (prawy i lewy), dwa zatrzaski z czerwonymi przyciskami mocujące budkę do ramy, tapicerka daszku, oraz okienko z moskitierą z zamkiem błyskawicznym.

- **Montaż.** Mocowaniem regulowanej budki z okienkiem są dwa plastikowe elementy znajdujące się na zewnętrznych bokach górnej części oparcia na plecy.

W celu montażu budki należy ustawić oparcie na plecy w pozycji pionowej, a następnie równolegle nasunąć oba zatrzaski budki do mocowań na oparciu na plecy. Budkę montujemy w taki sposób by tapicerka z tyłu/dołu zachodziła za plecy wózka.

- **Demontaż.** W celu demontażu budki z okienkiem, należy nacisnąć dwa czerwone przyciski na zatrzaskach mocujących budkę oraz wysunąć te zatrzaski z mocowań na oparciu na plecy.

- **Użytkowanie.** W celu zmiany wielkości powierzchni daszka, należy chwycić za łuk przedni oraz łuk tylny stelaża daszka i przybliżając lub oddalając oba łuki od siebie lub do siebie, ustawić żądaną pozycję. Mechanizm regulacji wielkości powierzchni budki zatrzaskuje się automatycznie.

Cechą szczególną budki jest okienko z moskitierą zapewniające przewiew. Okienko otwiera się i zamyka za pomocą zamka błyskawicznego.



Zdj. 11.3

Regulowana budka

11.4. Kosz na zakupy

Wózek wyposażony jest w kosz na zakupy, który zamocowany jest w dolnej części ramy wózka. Kosz na zakupy służy do przewożenia drobnych, zwyczajnych artykułów przemysłowych życia codziennego, odpornych na wstrząsy, uderzenia, stłuczenia, zamoknięcie, zalanie i zabrudzenie. Maksymalne obciążenie kosza na zakupy wynosi 3kg.



Zdj. 11.4

Kosz na zakupy

11.5. Pasy odwodząco-stabilizujące



Zdj. 11.5

Pasy odwodząco-stabilizujące

Pasy odwodząco-stabilizujące służą do dodatkowej stabilizacji miednicy i zapobiegają wyslizgnięciu się dziecka z wózka. Prawidłowy sposób ich stosowania polega na takim zapięciu na udach dziecka, żeby jego miednica przylegała jak najbliżej oparcia na plecy. Zapewni to zdrowszą i bardziej komfortową pozycję dziecka w wózku.

- **Regulacja.** W celu regulacji długości pasów odwodząco-stabilizujących, należy przesunąć regulatory na przednich taśmach pasów w górę lub w dół.
- **Użytkowanie.** W celu założenia dziecka pasów odwodząco-stabilizujących należy posadzić dziecko na zamontowane pasy, następnie opleść nogę dziecka i zapiąć obie klamry pasów do obu taśm przednich. W celu ściągnięcia z dziecka pasów odwodząco-stabilizujących należy rozpiąć obie klamry pasów od taśm przednich.

11.6. Klin

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w klin, który w przypadku określonych wskazań zapewnia odwodzenie (odchylenie na boki) kończyn dolnych dziecka od jego środka ciała. Klin posiada dwustopniowy poziom regulacji. Patrz Zdj. 11.6.



Zdj. 11.6

Klin



Zdj. 11.7

Wkładki wyścielające

11.7. Wkładki wyścielające

Wózek Mewa wyposażony jest we wkładki wyścielające, zabezpieczające rzepy na oparciu wózka, w przypadku, gdy nie są zakładane dodatkowe elementy wyposażenia. Patrz Zdj. 11.7.

11.8. Tapicerka

Wózek Mewa wyposażony jest w tapicerkę, która w całości jest demontowana do czyszczenia. W tym celu należy odpiąć wszystkie elementy mocujące ją do ramy wózka. Jak czyścić tapicerkę zostało opisane w pkt 17.8. Czyszczenie i pielęgnacja.

12. Wyposażenie dodatkowe

12.1. Peloty zagłówka z regulacją ↔ oraz ↕

W celu regulacji pelot zagłówka należy rozsunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia. Następnie wykręć pokrętła (pokrętła od pelot), które znajdują się na tylnej stronie oparcia. Przełóż peloty w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Dobrze przykręć peloty pokrętłami. Na koniec należy zasunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia.



Zdj. 12.1.

Widok na wózek z pelotami


12.2. Peloty piersiowo-lędźwiowe z regulacją ↔ oraz ↕

W celu regulacji pelot piersiowo-lędźwiowych należy rozsunąć zapięcie tapicerki na przedniej (Zdj. 12.2.1) i tylnej stronie oparcia (Zdj. 12.2.2). Następnie należy wykręcić pokrętła (pokrętła od pelot, Zdj. 12.2.3), które znajdują się na tylnej stronie oparcia oraz przełożyć peloty w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Peloty należy dobrze przykręcić pokrętłami. Na koniec zasunąć zapięcie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia (Zdj. 12.2.4).



Zdj. 12.2.1.

Rozpięcie tapicerki

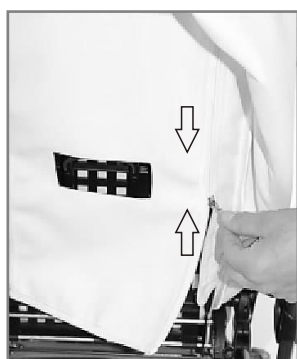

Zdj. 12.2.2.

Rozpięcie tapicerki



Zdj. 12.2.3.

Wykręcenie śrub



Zdj. 12.2.4.

Zapięcie tapicerki

12.3. Stolik terapeutyczny

Wózek wyposażony jest w antypoślizgowy stolik terapeutyczny, którego maksymalne obciążenie wynosi 3kg. W celu montażu stolika należy wsunąć go w mocowanie stolika lub barierki aż do kliknięcia.

Stolik będzie prawidłowo zamontowany dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo wsunięty w mocowanie stolika lub barierki. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik", pochodzący z dobrze połączonych mocowania stolika lub barierki.



Zdj. 12.3

Stolik terapeutyczny

W celu demontażu stolika należy nacisnąć dwa przyciski znajdujące się przy mocowaniu stolika lub barierki oraz wysunąć stolik.

Uwaga. Poziome ułożenie stolika może ulegać zmianie wraz z regulacją kołyski a tym samym przedmioty umieszczone na stoliku muszą zostać zabezpieczone.

12.4. Wkładki zwężająco-spływające

Wózek Mewa wyposażony jest w zestaw wkładek zwężająco-spływających (Zdj. 12.4). Służą one do regulacji wewnętrznych wymiarów szerokości i głębokości siedziska. Tapicerka wkładek jest zdejmowalna błyskawicznemu, co umożliwia ich wymianę lub czyszczenie.

- Montaż. Wkładki montujemy w dowolnym miejscu wózka, na dowolnej wysokości dostosowując się do wskazań pacjenta. Montaż odbywa się za pomocą rzepów na dolnej, tylnej i zewnętrznej stronie wkładki.

- Demontaż odbywa się ściągając element – odrywając rzep od tapicerki wózka.



Zdj. 12.4

Wkładki zwężająco-spływające

12.5. Torba turystyczna

Duża i elegancka torba turystyczna montowana jest na dwóch uchwytych, znajdujących się na wewnętrznej stronie rączki do pchania wózka. Maksymalne obciążenie torby wynosi 2kg.

12.6. Parasolka przeciwsłoneczna

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w parasolkę przeciwsłoneczną, która pomaga chronić dziecko przed słońcem.

12.7. Rękawice zimowe

Dwie rękawice zimowe, zwiększające komfort asystenta dziecka podczas chłodniejszej pogody, można założyć na rączkę do pchania wózka. Najpierw należy założyć dwie materiałowe obejmy i zapiąć je rzepem na rączce do pchania wózka po czym na te materiałowe obejmy nakłada się rękawice i spina je napami. Zdj. 12.7.



Zdj. 12.5

Torba turystyczna



Zdj. 12.6

Parasolka przeciwsłoneczna



Zdj. 12.7

Rękawice zimowe

12.8. Śpiwór na nogi

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w śpiwór na nogi, zwiększający komfort dziecka podczas chłodniejszej pogody. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego - barierki.

W celu montażu śpiwora na nogi, należy założyć go od dołu na podnózek, a od góry przełożyć przez barierkę zabezpieczającą i spiąć go napami do ramy wózka. Zdj. 12.8

12.9. Moskitiera

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w moskitierę, która utrudnia owadom bezpośrednią styczność z dzieckiem. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego. W celu montażu moskitiery należy połączyć ją zamkiem w budce a następnie zasłonić moskitierą siedzisko wózka i podnózek mocując z boku. Zdj. 12.9

12.10. Folia przeciwdeszczowa

Wózek inwalidzki Mewa może być wyposażony w folię przeciwdeszczową, która pomaga chronić dziecko przed wilgocią. Te wyposażenie dodatkowe wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego. W celu montażu folii przeciwdeszczowej należy nałożyć ją od góry na całą regulowaną budkę z okienkiem a następnie zasłonić folią siedzisko wózka i podnózek. Zdj. 12.10.



Zdj. 12.8
Śpiwór na nogi



Zdj. 12.9
Moskitiera



Zdj. 12.10
Folia przeciwdeszczowa

13. Specyfikacja techniczna wózka Mewa

PARAMETRY	MEWA
długość wózka	94-126 cm
szerokość wózka	65 cm
wysokość wózka	124 - 129 cm
masa całkowita	20 - 28 kg
efektywna głębokość siedziska	24*/28 cm
szerokość siedziska	25*/32 cm
wysokość oparcia	62 cm
szerokość oparcia	20** / 30 cm
odległość podnóżka od siedziska / ilość regulacji	17-32 / 5 pozycji
długość wózka złożonego do transportu	rama 84 cm /siedzisko 88 cm
szerokość wózka złożonego do transportu	rama 64 cm /siedzisko 43 cm
wysokość wózka złożonego do transportu	rama 26 cm /siedzisko 42 cm
nośność kosza	3 kg
nośność torby	2 kg
max. waga pacjenta	40 kg
wzrost pacjenta	90-125 cm
kąt płaszczyzny siedziska / ilość regulacji	ok 5,5°-21,5° / 4 pozycje
kąt pochylenia oparcia / ilość regulacji	ok 8°-86° / 4 pozycje + leżąca
kąt podnóżka / ilość regulacji	ok 64°-180° /5 pozycji

UWAGI:

*) wartości podane z wkładkami lub **) z pelotami

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian parametrów technicznych

13.1. Skład surowcowy wózka

Stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliestr oraz tworzywo sztuczne (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

14. Dostawa i narzędzia

Wózek inwalidzki Mewa jest dostarczany w kartonie i wstępnie zmontowany. W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama wózka wraz z siedziskiem i oparciem, podnózek oraz koła, budka,
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem,
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną.

Przed użyciem należy sprawdzić i upewnić się, że w otrzymanym kartonie znajdują się wszystkie elementy i żaden z nich nie uległ uszkodzeniu np. podczas transportu. W przypadku stwierdzenia, że w otrzymanym kartonie brakuje jakiegoś elementu lub jakiś element uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się ze Sprzedawcą i/lub Producentem, w celu otrzymania brakujących elementów lub wymiany produktu na nowy, w pełni kompletny i sprawny.

Wielofunkcyjność oraz bardzo bogate wyposażenie wózka inwalidzkiego Mewa pozwalają na dopasowanie wózka do osobistych wymagań użytkownika. W tym celu zapoznaj się dokładnie z całą instrukcją przed przystąpieniem do użytkowania.

Do montażu i demontażu wózka inwalidzkiego Mewa nie są wymagane żadne narzędzia za wyjątkiem regulacji wysokości podnóżka, gdzie jest potrzebny śrubokręt krzyżakowy.

15. Montaż i demontaż wózka

- **Montaż wózka.** Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany. Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) zamontować koła tylne na oś,
- b) rozłożyć ramę wózka wraz z podnóżkiem regulując parametry:
 - załączyć / wyłączyć blokadę kierunku jazdy przednich kół
 - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania wózka
 - ustawić kąt pochylenia siedziska
 - ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy
 - wyregulować długość pasów pięciopunktowych
 - wyregulować wysokość podnóżka oraz kąt pochylenia podnóżka
- c) zamontować odpowiednie wyposażenie oraz wyregulować parametry, przykładowo:
 - wyregulować szerokość i głębokość użytkową siedziska (wkładki zwężająco-sptycające)
 - założyć barierkę bezpieczeństwa lub stolik terapeutyczny
 - wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące
 - wyregulować budkę z okienkiem
 - założyć i wyregulować klin
 - założyć torbę turystyczną
 - założyć kosz na zakupy
 - założyć wybrane elementy wyposażenia dedykowanego porom roku: śpiwór na nogi, rękawice zimowe, moskitiera, folia przeciwdeszczowa, parasolka.

- **Demontaż wózka.** W celu demontażu wózka należy:

- a) zdemontować wyposażenie dodatkowe,
- b) odpiąć siedzisko,
- c) zablokować koła przednie, złożyć podnóżek i ramę wózka,
- d) odpiąć koła tylne,
- e) złożyć wózek zamykając go blokadą transportową.

16. Przygotowanie do użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy:

- Sprawdzić dobry stan techniczny wózka i wszystkich jego elementów, a jeżeli stan techniczny wózka lub jego pojedynczego elementu jest zły lub użytkownik ma do niego jakiegokolwiek wątpliwości, to wtedy wózka nie wolno użytkować. Prosimy o skontaktowanie się ze Sprzedawcą i/lub Producentem.
- Sprawdzić, czy rama wózka została prawidłowo rozłożona oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Sprawdzić, czy siedzisko zostało prawidłowo zamontowane do ramy wózka oraz czy mechanizm mocowania siedziska do ramy wózka został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Sprawdzić poprawność montażu wszystkich czterech kół. I dobry stan ogumienia bieżnika wszystkich czterech kół.
- Sprawdzić dobrą sprawność działania hamulca centralnego i załączyć hamulec.
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować wózek do potrzeb dziecka, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska terapeutycznego i wysokość oparcia na plecy, odpowiednie pochylenie siedziska terapeutycznego i pochylenie oparcia na plecy, ustawić odpowiednie pochylenie podnóżka, wyregulować odpowiednią długość pasów pięciopunktowych. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.
- Sprawdzić, czy tapicerka wózka jest sucha.
- Zabezpieczyć dziecko wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: pasy pięciopunktowe, wkładki zwężająco-splątujące, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, podnóżek, taśmy podnóżka na stopy, barierka zabezpieczająca lub stolik terapeutyczny. Ma to na celu zabezpieczenie dziecka przed wypadnięciem i wysunięciem się z wózka oraz zabezpieczenie stóp dziecka przed spadnięciem z podnóżka. Upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla dziecka odpowiednie i bezpieczne.
- Zadbaj, żeby dziecko nie było umieszczone w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką wózka. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała dziecka oraz względy higieniczne dziecka.
- W przypadku dzieci mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko wózka specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania wózka.

17. Użytkowanie wózka

17.1. Przenoszenie wózka

Najlepszym sposobem przenoszenia wózka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół. W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe (np. w celu transportu wózka w samochodzie), to ze względów bezpieczeństwa, wózek można podnosić i przenosić po uprzednim demontażu wyposażenia dodatkowego oraz kół, w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka z zamontowanymi kołami, należy zachować szczególną ostrożność.

Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka z zamontowanymi kołami, należy złożyć ramę wózka, a następnie trzymać ramę wózka wyłącznie za wskazane elementy stałe ramy.

Ze względów bezpieczeństwa, nie należy podnosić całego wózka, czyli ramy z siedziskiem i z oparciem na plecy, kołami, podnóżkiem i zamontowanym wyposażeniem dodatkowym, ponieważ grozi to uszkodzeniem zdrowia.

Nie należy podnosić wózka chwytając za jego podnóżek lub barierkę zabezpieczającą, stolik terapeutyczny ani żadne inne wyposażenie dodatkowe, ponieważ grozi to uszkodzeniem produktu i zagraża bezpieczeństwu innych osób z otoczenia.

17.2. Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka inwalidzkiego należy umieścić wózek jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulec centralny jest załączony, a płyta podnóżka podniesiona jest do góry w celu uniknięcia stawania na niej, użytkownik może się przesiadać.

Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wózka, dziecko i żadna inna osoba nie stawały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!

17.3. Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.

UWAGA! Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa dziecka znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się dziecka.

17.4. Jazda na wózku inwalidzkim

Podczas użytkowania wózek zawsze należy trzymać za rączkę do pchania wózka, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się wózka. Zwolnij hamulec centralny jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj wózek w bezpiecznym kierunku.

17.5. Poruszanie się po powierzchniach pochyłych

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawiać wózek przodem do kierunku jazdy.

Ogranicz prędkość na powierzchniach pochyłych i poruszaj się jak najwolniej. Asystent prowadzący wózek (rodzic, opiekun) musi dysponować odpowiednią siłą pozwalającą kontrolować stabilność

wózka inwalidzkiego. Zawsze należy pamiętać o tym, że położenie środka ciężkości wózka ulega zmianie przy pokonywaniu nierówności lub pochyłości w terenie. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i asekurować wózek.

Podczas korzystania z podjazdów należy upewnić się, że podjazd jest odpowiedni, że koła wózka są wystarczająco wysokie do pokonania podjazdu, że rama wózka nie będzie się stykała z podjazdem oraz należy zapewnić pomoc drugiej osoby, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, uszkodzenia produktu i urazu użytkownika.

17.6. Pokonywanie progów lub krawężników

Podczas pokonywania małych przeszkód (niewielkie progi, małe krawężniki itp.), należy przyblokować stopą stopkę przechyłową oraz rączkę do pchania wózka w kierunku w dół i do siebie, żeby unieść przednie koła wózka i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania wózka do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła wózka i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

17.7. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

- W celu przewiezienia wózka Mewa w samochodzie należy zdemontować z wózka wszystkie akcesoria i przechować je w bezpiecznym miejscu. Następnie należy zdemontować wózek i umieścić go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z wózkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach należy zdemontować z wózka wszystkie akcesoria i przechować je w bezpiecznym miejscu. Następnie należy zdemontować wózek (patrz rozdział 14) i umieścić go w miejscu przechowywania bagażu w danym pojeździe. Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku pojazdu oddzielonym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu.

Wózka Mewa nie należy używać jako siedziska do przewożenia dziecka w pojeździe.

17.8. Czyszczenie i pielęgnacja

Tapicerkę można prać tylko ręcznie przy zachowaniu ostrożności, w temperaturze do 30⁰.

Nie wolno prać w pralce. Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Nie ścieraj - ścieranie spowoduje rozprzestrzenienie się plamy na większą powierzchnię i może zniekształcić teksturę tkaniny oraz zniszczyć jej powłokę.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.



Prać tylko
ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w
suszarce
bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

Postępowanie w przypadku wodnych plam, takich jak plamy z jedzenia, napojów i olejów roślinnych:

- Osusz plamę dociskając na całej jej powierzchni biały papierowy ręcznik, chusteczkę lub chłonną, czystą szmatkę.
- Mały kawałek szmatki nasącz słabym roztworem detergentu i ciepłej wody (lub zimnej wody w przypadku zabrudzeń krwią) i opłucz plamę usuwając ją od zewnątrz do środka, żeby uniknąć jej powiększania się. Nie używaj zbyt mokrej szmatki, gdyż nadmierna ilość cieczy może spowodować powstanie obwódki po wyschnięciu lub powiększenie się plamy i zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnętrzu.
- Może być konieczne powtórzenie powyższej czynności w zależności od rodzaju plamy i ilości zaplamionego materiału. Powyższą czynność należy kontynuować, aż do całkowitego usunięcia plamy, ale zawsze pamiętaj, żeby usunąć nadmiar wilgoci z zaplamionego materiału przed ponownym opłukiwaniem.
- Następnie należy opłukać materiał używając tylko letniej wody bez detergentu, za pomocą czystej gąbki lub czystej białej szmatki. Wysuszyć.

18. Przechowywanie wózka

Wózek należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C.

18.1. Przygotowanie wózka do długotrwałego przechowywania

W celu przygotowania wózka inwalidzkiego Mewa do długotrwałego przechowywania, należy zabezpieczyć produkt i wykonać wszystkie czynności serwisowe przedstawione w rozdziale "Przeglądy okresowe" tak, jakby nastąpił ich czas.

Wózek należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

18.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu uniknięcia uszkodzeń korozyjnych wózka, nie powinno się go użytkować ani zostawiać w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych.

Po zamoczeniu wózka, należy wytrzeć wszystkie zamoczone elementy miękką szmatką do sucha oraz zabezpieczyć środkiem konserwującym na bazie lekkiego oleju. Nie dotyczy to tapicerki wózka, której zapewnienie czystości i konserwacji opisane jest szczegółowo w rozdziale Czyszczenie i pielęgnacja.

Standardowo wózek pokryty jest powłokami najwyższej jakości. W razie uszkodzenia lakieru należy uszkodzenie zabezpieczyć poprzez nałożenie zaprawki przy użyciu proponowanego przez Producenta lakieru.

Regularne czyszczenie i smarowanie mechanizmów wózka lekkim olejem, gwarantuje długie i bezproblemowe użytkowanie wózka inwalidzkiego.

19. Powtórne użycie

Produkt nadaje się do powtórnego użycia.

Wszelkie produkty powtórnego użycia podlegają szczególnemu obciążeniu.

W związku z tym ich cechy i osiągi mogą odbiegać od produktu nowego w takim stopniu, że zagrożone jest bezpieczeństwo pacjentów i osób trzecich w trakcie ich użytkowania.

Produkt przy odpowiedniej pielęgnacji i konserwacji zachowuje swoją jakość przez okres 3 lat i tyle wynosi spodziewany okres jego użytkowania.

W celu wtórnego użycia należy:

- Zdemontować wszystkie elementy tapicerowane i wymienić je na nowe.
- Ramę wózka wraz z kołami i elementami do prowadzenia należy dokładnie wyczyścić i zdezynfekować dostępnymi na rynku środkami czyszczącymi i dezynfekującymi.
- Następnie produkt musi zostać sprawdzony przez autoryzowany Serwis (patrz rozdział 25) lub Producenta pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Wszelkie zużyte części oraz komponenty niepasujące lub nienadające się dla użytkownika należy wymienić na nowe.
- Tak przygotowany produkt może zostać ponownie wprowadzony do użycia.

20. Serwis i przeglądy okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wózka inwalidzkiego Mewa, należy regularnie i dokładnie poddawać go przeglądom i czynnościom serwisowym wskazanym w tabeli poniżej.

W sytuacji, gdy użytkownik wózka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wózek do specjalistycznego punktu serwisującego wózki inwalidzkie lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

UWAGA! Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne wózka powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji wózka. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 25) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy wózka wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku jego zakupu w wyspecjalizowanym sklepie medycznym.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem wózka**
 - Kontrola sprawności hamulca centralnego - Po załączeniu hamulca centralnego oba tylne koła wózka powinny być zablokowane i nie mogą się obracać
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić

uwagę na: prawidłowe zamontowanie siedziska terapeutycznego z oparciem na plecy do ramy wózka, prawidłowe zamontowanie wszystkich czterech kół, prawidłowe funkcjonowanie pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.

- Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte
- Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- **Co każdy jeden miesiąc**
 - Czyszczenie wózka -Należy oczyścić miękką szmatką wszelkie elementy ruchome, łożyska, mechanizmy regulacyjne, a następnie nasmarować je kilkoma kroplami lekkiego oleju. Zaleca się ostrożność, żeby nie ubrudzić tapicerki wózka lub własnego ubrania
 - Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów - Należy dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie wszystkich śrub i pokręteł znajdujących się w wózku.
- **Co każde sześć miesięcy**
 - Sprawdzenie czystości tapicerki i sprawdzenie ogólnego stanu wózka - Nie należy dopuszczać do zaniedbania wózka, zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielęgnacja"
 - Sprawdzenie stanu ogólnego wózka. Nie należy dopuszczać do zaniedbania wózka

21. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zużyty wózek należy oddać do punktu zajmującego się recyklingiem zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

22. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu

23. Notatki

24. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

POLSKA

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Spółka Jawna

ul. Szczecińska 10, 41-516 Chorzów, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: mywam@mywam.pl

25. Karta Gwarancyjna

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

.....
.....
.....
.....

Warunki gwarancji

- Sprzedawca udziela nabywcy na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- Nabywca reklamujący wózek powinien dostarczyć wózek do Sprzedawcy w opakowaniu, czysty (wolny od plam, dodatkowego wyposażenia nie należącego do wózka, wilgoci, sierści itp.) wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka.
- Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
- Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i jego elementy.
- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy wózka.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wózka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka.
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wózka prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją wózka proszę kierować do Sprzedawcy.