

CE



Zdjęcie poglądowe



Instrukcja obsługi i konserwacji

Edycja 10 / 2023-12-05

Wózek inwalidzki specjalny – **YETI**

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy – **YETI YOUNG**

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Użytkownik z nieprawnością widzenia, czytania lub nieprawnością poznawczą proszony jest o zgłoszenie się do Producenta.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obsługi i konserwacji przeznaczona jest dla osób sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi (asystentów użytkownika - rodziców, opiekunów), które będą przewożone w wózku. Przeznaczona jest również dla lekarzy i rehabilitantów obsługujących wózek.

UWAGA! Przed przystąpieniem do użytkowania wózka, każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszej instrukcji i stosowania się do niej.

UWAGA! W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego związanego z obecnością wózka inwalidzkiego specjalnego Yeti oraz wózka inwalidzkiego specjalnego dziecięcego Yeti Young, należy niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym Producenta, kontaktując się poprzez list polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

- adres pocztowy: MyWam sp. z o.o., ul. Lwowska 34, 41-500 Chorzów, Polska
- numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31
- adres e-mail: mywam@mywam.eu



Wersja Instrukcji obsługi i konserwacji: PL **Edycja 10 / 2023-12-05**

MyWam sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych w treści Instrukcji obsługi i konserwacji bez wcześniejszego uprzedzania. Każda zmiana zostanie określona datą ostatniej aktualizacji instrukcji. Instrukcja w wersji elektronicznej będzie dostępna na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! Zdjęcia zawarte w Instrukcji użytkowania mają charakter poglądowy i mogą się różnić od zakupionego wyrobu.

Spis treści

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wózka Yeti/ Yeti Young.....	5
2. Szybki start.....	5
▪ Bezpieczeństwo.....	6
3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa.....	6
4. Tabliczki	6
5. Oznaczenie symboli	7
▪ Produkt.....	7
6. Ogólna budowa wózka	7
7. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka	8
7.1. Mechanizm składania ramy	8
7.2. Rozkładanie ramy wózka	8
7.3. Składanie ramy wózka	9
7.4. Blokada transportowa. Zakładanie i ściąganie blokady transportowej.....	9
7.5. Przednie koła. Blokada kierunku jazdy przednich kół.....	9
7.6. Tyłne koła. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę.....	10
7.7. System amortyzacji tylnych kół	10
7.8. Rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowa rączki.....	10
7.9. Hamulec centralny. Załączanie i wyłączanie hamulca	10
7.10. Stopka przechyłowa.....	10
7.11. Regulacja ramy w zakresie głębokości siedziska	10
7.12. Regulacja ramy w zakresie zmiany kąta siedziska.	11
7.13. Regulacja ramy w zakresie wysokości oparcia	11
7.14. Regulacja ramy w zakresie kąta pochylenia oparcia	11
7.15. Podnózek. Regulacja i użytkowanie.....	11
8. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy	12
8.1. Tapicerka wózka. Montaż tapicerki do stelaża ramy wózka. Demontaż.	12
8.2. Regulowany system napięciowy.....	13
8.3. Regulacja tapicerki siedziska i oparcia.....	13
8.4. Pasy pięciopunktowe.....	14
9. Wyposażenie dodatkowe	14
9.1. Barijerka zabezpieczająca	14
9.2. Stolik terapeutyczny	14
9.3. Pasy odwodząco-stabilizujące	14
9.4. Wkładki zwężająco-splątujące.....	15
9.5. Zagłówek.....	15
9.6. Regulowany daszek z okienkiem	15
9.7. Torba turystyczna	16
9.8. Kosz na zakupy.....	16
9.9. Klin	16
9.10. Folia przeciwdeszczowa.....	16
9.11. Rękawice zimowe	16
9.12. Śpiwór na nogi	17
9.13. Moskitiera.....	17

9.14.	Parasolka przeciwsłoneczna	17
10.	Specyfikacja techniczna wózka Yeti.....	18
10.1.	Skład surowcowy wózka	18
11.	Dostawa i narzędzia	18
12.	Montaż i demontaż wózka	19
13.	Przygotowanie do użytkowania.....	19
14.	Użytkowanie wózka	20
14.1.	Przenoszenie wózka.....	20
14.2.	Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego	20
14.3.	Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim	21
14.4.	Jazda na wózku inwalidzkim	21
14.5.	Poruszanie się po powierzchniach pochyłych	21
14.6.	Pokonywanie progów lub krawężników	21
14.7.	Transport w samochodzie i w innych pojazdach	21
14.8.	Czyszczenie i pielęgnacja	22
15.	Przechowywanie wózka.....	22
16.	Serwis i przeglądy okresowe	22
17.	Utylizacja	23
18.	Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych.....	23
19.	Lista autoryzowanych punktów serwisowych	24
20.	Karta Gwarancyjna	25
21.	Notatki	26

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wózka Yeti/ Yeti Young

Wózek inwalidzki specjalny Yeti oraz wózek specjalny dziecięcy Yeti Young jest wyrobem medycznym klasy I wskazanym do używania przez te osoby niepełnosprawne, które ze względu na swoje schorzenie nie mogą samodzielnie chodzić stać i/lub siadać. Wyrób przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyższych osób w pozycji siedzącej lub leżącej oraz na korekcji postawy i na tym polega jego przewidziane zastosowanie.

Wskazania kliniczne to m.in. mózgowie porażenie dziecięce, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie, niedowłady itp.

Wyrób przewidziany jest dla użytkowników od 130-175cm oraz wadze do 80 kg. Wyrób powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego lub fizjoterapeuty.

Przeciwwskazania:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.

2. Szybki start

Aby szybko użytkować wózek należy go rozpakować i przygotować do użytkowania wg pkt 12 Montaż i demontaż wózka oraz pkt 13 Przygotowanie do użytkowania.



▪ Bezpieczeństwo

3. Ważne wskazówki i zasady bezpieczeństwa

- Zabrania się użytkowania wózka w sposób, do którego wózek nie jest przeznaczony.
- Produkt zawiera małe części, które mogą być niebezpieczne w przypadku połknięcia przez użytkownika!
- Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa użytkownika znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się użytkownika.
- Zabrania się umieszczania na wózku dodatkowego ciężaru, co w szczególności dotyczy umieszczania dodatkowego ciężaru z tyłu oparcia np. plecaka lub torby. Może to spowodować przewrócenie wózka i obrażenia użytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriów dodatkowych dedykowanych do wózka Yeti nieprzekraczających dopuszczalnego obciążenia. Wszystkie dodatkowe elementy mocowane do wózka wpływają na jego stabilność.
- **UWAGA!** W zależności od wykonanych regulacji - dotyczy ustawienia rączki do pchania wózka, regulacji wysokości oparcia, regulacji kątowej oparcia, regulacji głębokości siedziska, regulacji kątowej siedziska, regulacji kąta podnóżka oraz ustawienia podnóżka - to wózek ten może przekraczać zalecane maksymalne gabaryty.
- **UWAGA!** Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwężenia, ograniczające kierunek jazdy wózka, należy upewnić się, czy po obu stronach wózka jest odpowiednia ilość miejsca, co zapobiega przytrzaśnięciu się dłoni lub innych części ciała, jak również zapobiega uszkodzeniu wózka.
- **UWAGA!** Temperatura wózka może wzrosnąć, gdy wózek jest wystawiony na działanie promieni słonecznych.

OSTRZEŻENIE!




- Nigdy nie pozostawiaj użytkownika bez opieki w wózku, ponieważ grozi to niebezpieczeństwem!
- Ten produkt nie nadaje się do biegania lub jazdy na łyżwach czy rolkach.
- Wózek nie jest przeznaczony jako siedzisko w pojazdach.
- Uwaga na szczeliny i elementy ruchome – grozi zakleszczeniem.
- Nie przenosić wózka z użytkownikiem.
- Wózek zapakowany jest w worek. Przechowywać poza zasięgiem niemowląt i małych dzieci.


- **UWAGA!** Zabrania się użytkowania wózka, jeżeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego elementu budzi wątpliwości użytkownika lub jest wyraźnie nieprawidłowy, wówczas nie wolno go użytkować. W takiej sytuacji zaleca się pilny kontakt ze Sprzedawcą w celu otrzymania porady.

4. Tabliczki


Tabliczka znamionowa

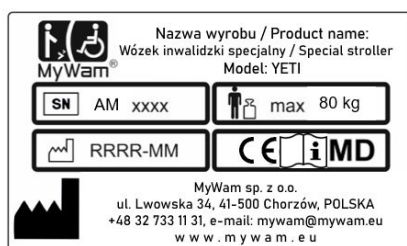

Tabliczka z kodem UDI

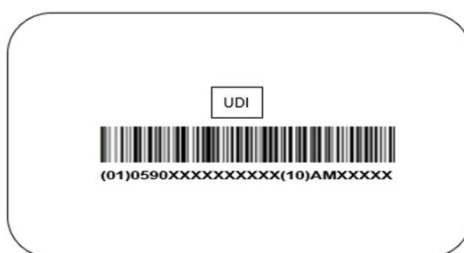

Tablica ostrzegawcza

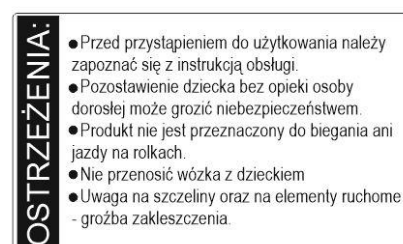

5. Oznaczenie symboli

	Numer seryjny produktu		Nazwa producenta
	Dopuszczalny całkowity ciężar użytkownika		Dany produkt jest wyrobem medycznym
	Data produkcji		OPIS " OSTRZEŻENIE! " i symbol w niniejszej instrukcji używane są w celu wzmocnienia uwagi osoby czytającej na treść oznaczoną tym znakiem. Niestosowanie się do treści oznakowanych tym opisem może stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa użytkownika i osób towarzyszących, a także może doprowadzić do uszkodzenia produktu.
	Znak oceny zgodności według odpowiednich rozporządzeń i dyrektyw europejskich		
	Ostrzeżenie o postępowaniu zgodnie z Instrukcją obsługi i konserwacji produktu		

■ Produkt

6. Ogólna budowa wózka

• Stalowa rama wózka wraz z siedziskiem i oparciem



- | | |
|---|------------------|
| 1- Rączka do pchania wózka | - patrz pkt 7.8 |
| 2- Regulacja sznurkowa nadmiaru tapicerki | - patrz pkt 8.3 |
| 3- Pasy pięciopunktowe | - patrz pkt 8.4 |
| 4- Zdejmowana tapicerka oparcia i siedziska | - patrz pkt 8.1 |
| 5- Szczelina do chowania nadmiaru tapicerki | - patrz pkt 8.1 |
| 6- Owijacz na ramę | - patrz pkt 8.1 |
| 7- Regulowany podnóżek z pasami | - patrz pkt 7.15 |
| 8- Stopka przechyłowa | - patrz pkt 7.10 |
| 9- Hamulec centralny | - patrz pkt 7.9 |
| 10- System amortyzacji tylnych kół | - patrz pkt 7.7 |
| 11- Tylne koła, pełne | - patrz pkt 7.6 |



- | | |
|---|------------------|
| 12- Mechanizm regulacji kątowej rączki do pchania | - patrz pkt 7.8 |
| 13- Mechanizm składania ramy | - patrz pkt 7.1 |
| 14- Regulacja kąta oparcia | - patrz pkt 7.14 |
| 15- Regulacja głębokości siedziska | - patrz pkt 7.11 |
| 16- Regulacja kąta siedziska | - patrz pkt 7.12 |
| 17- Regulacja wysokości oparcia | - patrz pkt 7.13 |
| 18- Blokada mechanizmu składania ramy | - patrz pkt 7.3 |
| 19- Mechanizm regulacji kątowej całego podnóżka | - patrz pkt 7.15 |
| 20- Mechanizm regulacji kątowej oparcia | - patrz pkt 7.14 |
| 21- Blokada transportowa | - patrz pkt 7.4 |
| 22- Regulacja długości podnóżka | - patrz pkt 7.15 |
| 23- Mechanizm szybkiego montażu kół tylnych | - patrz pkt 7.6 |
| 24- Blokada kierunku jazdy przednich kół | - patrz pkt 7.5 |
| 25- Przednie koła skrętne, pełne | - patrz pkt 7.5 |

• Wyposażenie dodatkowe

- Bariierka zabezpieczająca - patrz pkt 9.1
- Stolik terapeutyczny - patrz pkt 9.2
- Pasy odwodząco-stabilizujące - patrz pkt 9.3
- Wkładki zwężająco-splęcające - patrz pkt 9.4
- Zagłówek z regulacją $\updownarrow$ - patrz pkt 9.5
- Regulowany daszek z okienkiem - patrz pkt 9.6
- Torba turystyczna - patrz pkt 9.7
- Kosz na zakupy - patrz pkt 9.8
- Klin - patrz pkt 9.9
- Folia przeciwdeszczowa - patrz pkt 9.10
- Rękawice zimowe - patrz pkt 9.11
- Śpiwór na nogi - patrz pkt 9.12
- Moskitiera - patrz pkt 9.13
- Parasolka przeciwsłoneczna - patrz pkt 9.14



7. Konfiguracja i użytkowanie – rama wózka

7.1. Mechanizm składania ramy

- łamaniec prawy i lewy - element umożliwiający złożenie górnej ramy w celu zmniejszenia jej wymiarów,
- mechanizm składania ramy wraz z blokadą.

7.2. Rozkładanie ramy wózka

Ułóż ramę wózka poziomo na podłożu i ściągnij blokadę transportową (Zdj. 7.2.1). Następnie pociągnij delikatnie oparcie do pozycji pionowej (Zdj. 7.2.2).



Zdj. 7.1



Zdj. 7.2.1



Zdj. 7.2.2

Aby ustawić wózek pociągnij rączkę podnosząc ją delikatnie w górę jednocześnie ustawiając wózek w pozycji zbliżonej do pożądaney (Zdj. 7.2.3) aż do momentu zaskoczenia blokady składania ramy (Zdj. 7.2.4). Rama wózka będzie prawidłowo rozłożona dopiero wtedy, gdy zostanie prawidłowo zamknięty mechanizm składania ramy. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik".



Zdj. 7.2.3



Zdj. 7.2.4

7.3. Składanie ramy wózka

- **Złożenie ramy:** zwolnij blokadę mechanizmu składania ramy (Zdj. 7.3) pociągając ją do góry oraz pociągnij oba uchwyty składania ramy do góry aż do momentu zwolnienia ramy. Złóż ramę wózka składając ją w przód, w kierunku kół przednich. Zwróć uwagę by rączka do pchania oraz podnóżek były ustawione w pozycji nie kolidującej ze sobą. Pociągnij za mechanizm zwolnienia oparcia. Załóż blokadę transportową.



Zdj. 7.3

7.4. Blokada transportowa. Zakładanie i ściąganie blokady transportowej

- **Zakładanie blokady:** złóż ramę, nałóż oczko blokady na bolec blokady tak, żeby oba te elementy ściśle na siebie nachodziły (Zdj. 7.4).
- **Ściąganie blokady:** przed rozłożeniem ramy, ściągnąć oczko blokady z bolca blokady i dopiero wtedy można przystąpić do rozkładania ramy wózka.



Zdj. 7.4



Zdj. 7.5.1

7.5. Przednie koła. Blokada kierunku jazdy przednich kół

- **Blokada kierunku jazdy:** załóż pokrętło blokady w szczelinę (Zdj. 7.5.1).
- **Ściąganie blokady:** odciągnij i obróć pokrętło blokady oraz pozostaw je poza szczeliną (Zdj. 7.5.2).



Zdj. 7.5.2

7.6. Tyłne koła. Montaż i demontaż tylnych kół na ośkę



Zdj. 7.6.1

Montaż kół na ośkę: wciśnij klamrę (Zdj. 7.6.1) i nałóż koło na początek jego ośki. Następnie przestań naciskać na klamrę i wsuń koła na jego ośkę, aż do kliknięcia.


Demontaż kół z ośki: wciśnij klamrę znajdującą się na środku koła i wysuń koło z jego ośki (Zdj. 7.6.2).



Zdj. 7.6.2

7.7. System amortyzacji tylnych kół

Amortyzacja działa automatycznie. Regulacja następuje poprzez uruchomienie dźwigni góra - dół zlokalizowanej od dołu amortyzatora (Zdj. 7.7). Pod wpływem przełączenia dźwigni sprężyna amortyzatora zostanie ściśnięta (opcja dla twardego podłoża) lub rozciągnięta (miękkie podłoża).

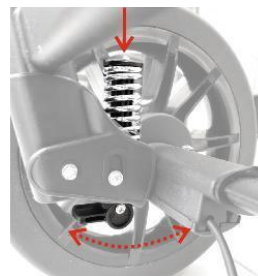

Zdj. 7.7



Zdj. 7.8

7.8. Rączka do pchania wózka. Mechanizm i regulacja kątowa rączki.

- **Mechanizm regulacji:** dwa przyciski po zewnętrznej stronie ramy, umieszczone na przegubach rączki do pchania wózka (Zdj. 7.8).
- **Regulacja kątowa:** naciśnij jednocześnie oba przyciski mechanizmu regulacji kątowej rączki do pchania i zmień jej kąt pochylenia, następnie zwolnij je.

7.9. Hamulec centralny. Załączanie i wyłączenie hamulca

- **Załączanie:** naciśnij pedał hamulca w dół (Zdj. 7.9), w kierunku do podłoża, aż do kliknięcia. Hamulec centralny służy tylko i wyłącznie do blokady całkowitej kół – nie ma funkcji hamowania dynamicznego!
- **Wyłączenie:** pociągnij stopą pedał hamulca do góry.



Zdj. 7.9

7.10. Stopka przechyłowa

Używanie stopki przechyłowej ułatwia wjazd wózka na niewielkie progi lub krawężniki (Zdj. 7.10).



Zdj. 7.10

7.11. Regulacja ramy w zakresie głębokości siedziska



Zdj. 7.11

Załącz hamulec centralny, poluzuj śrubę kluczem imbusowym z obu stron ramy (Zdj. 7.11) i wysuń lub wsuń równomiernie stelaż siedziska (ramę siedziska) do pożądanej pozycji. Właściwą pozycję zabezpiecz dokręcając śrubę z boków ramy. Stelaż można wysunąć pozostawiając min 15cm zakładki stalowych elementów ramy. Regulacja ramy następuje w zakresie od 30 do 45 cm. Zakres regulacji tapicerki siedziska opisana jest w pkt 8.3.

7.12. Regulacja ramy w zakresie zmiany kąta siedziska.

- **Mechanizm regulacji kąta siedziska:** załącz hamulec centralny, odkręć z obu stron pokrętło, ustaw siedzisko zgodnie z wybraną pozycją i przykręć pokrętło we właściwym położeniu (Zdj. 7.12).



Zdj. 7.13

7.13. Regulacja ramy w zakresie wysokości oparcia

- **Regulacja:** załącz hamulec centralny, poluzuj śrubę kluczem imbusowym z obu stron ramy (Zdj. 7.13) i wysuń lub wsuń równomiernie stelaż oparcia (ramę oparcia) do pożądanej pozycji. Zabezpiecz wybraną pozycję przykręcając śrubę. Stelaż można wysunąć pozostawiając min 15cm zakładki stalowych elementów ramy. Poziom maximum wskazuje blokada kulkowa. Regulacja ramy następuje w zakresie od 65 do 85 cm.




Zdj. 7.12

7.14. Regulacja ramy w zakresie kąta pochylenia oparcia


- **Regulacja:** załącz hamulec centralny, pociągnij linkę zwalniającą blokadę do góry (Zdj. 7.14.2) i ustaw oparcie w pożądanej wartości (8 stopniowa skala). Zablokuj oparcie poprzez puszczenie linki zwalniającej blokadę i po upewnieniu się, że blokada zaskoczyła po obu stronach wózka jednocześnie (weszła głęboko w grzebienie).

Przy zmianie położenia oparcia konieczna jest regulacja tapicerki.

Mechanizm regulacji kątowej oparcia zmienia ustawienie oparcia na plecy względem siedziska terapeutycznego w sześciu pozycjach, począwszy od pozycji siedzącej pod kątem prostym, aż do pozycji prawie w pełni leżącej.

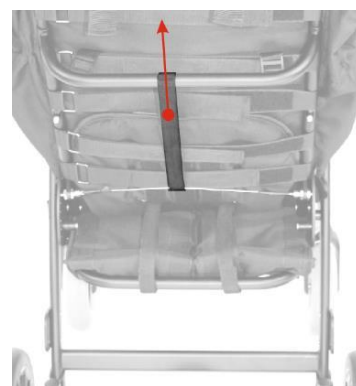

Zdj. 7.14.2

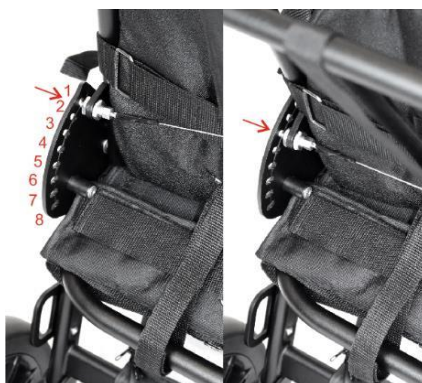

Zdj. 7.14.1

Uwaga! Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.



Zdj. 7.15.1

7.15. Podnóżek. Regulacja i użytkowanie.

- **Regulacja wysokości podnóżka:** odkręć pokrętła mocujące podnóżek do ramy (Zdj. 7.15.1), po obu jego stronach, ustaw podnóżek na odpowiedniej wysokości i przykręć z powrotem obiema śrubami, dokręcając je pokrętłami, aż do wyczuwalnego oporu.

- **Mechanizm regulacji kątowej całego podnóżka:** dwa plastikowe, czarne przeguby z przyciskami w środku (Zdj. 7.15.2). Naciśnij przyciski po obydwu stronach, ustaw odpowiednią pozycję i zwolnij przyciski.



Zdj. 7.15.2

Mechanizm regulacji kątowej podnóżka podczas użytkowania powinien zostać zabezpieczony owijaczami tapicerki (patrz pkt 8.1).

- **Użytkowanie podnóżka:** zaleca się ustawić płytę podnóżka na takiej wysokości, żeby stopy użytkownika mogły się na niej swobodnie oprzeć całą swoją powierzchnią, a jednocześnie uda użytkownika były położone równoległe do płaszczyzny siedziska. W płycie podnóżka znajdują się taśmy mocujące stopy użytkownika. Zaleca się ich zakładanie podczas użytkowania wózka.

Standardowo płyta podnóżka znajduje się w położeniu poziomym. Jednak w czasie transportu, przechowywania, rehabilitacji, wsiadania i wysiadania z wózka, płyta podnóżka musi być złożona i obrócona w kierunku stelaża podnóżka.

8. Konfiguracja i użytkowanie -siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy

8.1. Tapicerka wózka. Montaż tapicerki do stelaża ramy wózka. Demontaż.

Tapicerka składa się z kilku elementów: podstawy tapicerki, tapicerki siedziska, tapicerki oparcia i owijaczy na ramę. Przed regulacją tapicerki należy odpowiednio wyregulować ramę: wysokość oparcia, głębokość siedziska i wysokość podnóżka.

- **Montaż tapicerki:**

- ✓ załóż **podstawę tapicerki** w miejscu siedziska za pomocą regulowanych taśm (rzepów) naciągając je dokładnie. Taśmy podstawy tapicerki zamontuj od dołu zawijając je na ramie siedziska (od zewnątrz). Pierwszy rzep od strony podnóżka montujemy jeszcze na plastikowym fragmencie łamańca, ale od strony wnętrza siedziska. Nadmiar tapicerki w ustawieniu minimalnym siedziska zawiń z tyłu siedziska. Podstawa tapicerki powinna zostać właściwie naciągnięta umożliwiając ponadto założenie owijaczy na ramę w miejscach łamańców siedziska (przy styku z podnóżkiem, po prawej i lewej stronie).
- ✓ **owijacze ramy** chronią użytkownika przed tarciem w miejscach łamańców. Zamontuj rzepem do dołu na plastikowych elementach łamańców.
- ✓ na podstawę tapicerki nałóż **tapicerkę oparcia** i zamontuj pasami z tyłu owijając od zewnątrz ramę. W przypadku stosowania minimalnej wysokości oparcia nadmiar tapicerki od góry nawiń na ramę i ściągaj pasami regulując na właściwą odległość poprzez dolną klamrę. W przypadku, gdy oparcie jest wysunięte w maximum górną część nałóż na ramę i ściągaj poprzez górną klamrę.

Aby prawidłowo zamontować boczne osłony tapicerki oparcia wózka zaleca się położenie oparcia do pozycji 45° i zamocowanie rzepami z prawej i lewej strony wózka w dwóch miejscach na bocznej ramie (przy blokadzie składania ramy). Po ustawieniu oparcia w pozycji pionowej nadmiar tapicerki z boków można zebrać sznurkami z zaciskami.

- ✓ **tapicerkę siedziska** nałóż na koniec odpowiednio układając i dostosowując do rzepów na podstawie tapicerki. Nadmiar tapicerki przeciągnij pod tapicerką oparcia i zawiń do góry (na plecy) pod pasami tapicerki oparcia. Pas montujący tapicerkę siedziska (montowany pod spodem siedziska obejmując ramę od zewnątrz) powinien wpasować się ponad pierwszym rzepem tapicerki podstawy i nie powinien kolidować z owijaczem na ramę. Dolną część tapicerki siedziska przyczep rzepami do ramy podnóżka.

Tapicerka siedziska wózka posiada dodatkowy pas materiału łączący ją z barierką. W przypadku, gdy jest niepotrzebny można go schować poprzez przeciągnięcie w dedykowanej szczelinie (Zdj. 8.1).

- **Demontaż tapicerki:** zdemontuj stosując kroki poprzednie w odwrotnej kolejności, a więc:



Zdj. 8.1

- ✓ odepnij taśmy tapicerki siedziska i ściągnij tę tapicerkę „odrywając” ją od rzepów,
- ✓ odczep boki oparcia w tapicerce oparcia i ściągnij zabezpieczenie górnej części oparcia,
- ✓ odczep wszystkie pasy i ściągnij tapicerkę oparcia,
- ✓ ściągnij owijacze z ramy,
- ✓ otwórz wszystkie pasy podstawy tapicerki i ściągnij je z ramy.

8.2. Regulowany system napięciowy



Zdj. 8.2.1



Zdj. 8.2.2

Regulowany system napięciowy to zestaw aż 14 niezależnych pasów velcro, które umożliwiają odpowiednie dopasowanie napięcia zarówno siedziska jak i oparcia pod indywidualne potrzeby użytkownika. System ten składa się z 7 pasów na tyle oparcia (Zdj. 8.2.1) i 7 pasów na spodzie siedziska (Zdj. 8.2.2).

• **Regulacja:** odpowiednio napnij lub poluzuj pasy. Możliwość punktowego lub całociowego zapadnięcia się w siedzisku i oparciu oraz zwiększenie wsparcia po przez całociowe bądź też punktowe zwiększenie sztywności / napięcia zarówno siedziska jak i oparcia.

8.3. Regulacja tapicerki siedziska i oparcia

• **Regulacja tapicerki siedziska:** wysuń ramę (patrz pkt 7.11) i dostosuj tapicerkę do wymaganych parametrów. Aby zmienić głębokość siedziska zdejmij tapicerkę siedziska, wyreguluj ramę siedziska w zakresie głębokości (wsuń lub wysuń ramę siedziska do pożądanego rozmiaru). Załóż tapicerkę siedziska na podstawę siedziska i przypnij ją rzepami.

• **Regulacja tapicerki oparcia:** wysuń ramę (patrz pkt 7.13) i dostosuj tapicerkę do wymaganych parametrów. Aby zmienić wysokość oparcia odepnij górną część tapicerki oparcia z pasków zaciskowych z tyłu wózka i wyreguluj górną ramę wózka (wysuń lub wsuń górną część ramy oparcia aż do właściwej pozycji). Po wybraniu pozycji ułóż górną część tapicerki dostosowując ją do

ramy. W przypadku wózka ustawionego w pozycji minimalnego oparcia może zaistnieć konieczność nawinięcia tapicerki na górną część ramy. Tapicerkę od góry zapnij taśmami na klamry (dolne w przypadku wózka z najmniejszym oparciem, górne klamry w przypadku siedziska w największej pozycji). Przed włożeniem użytkownika należy wyregulować napięcie tapicerki siedziska i oparcia regulując komplet pasów (Patrz pkt. 8.2).

• Aby ułożyć boki tapicerki oparcia wyreguluj sznurkami stan „ściągnięcia” tapicerki. Dla wózka w pozycji siedzącej nadmiar tapicerki należy ściągnąć sznurkami w dwóch miejscach z każdej ze stron (Zdj. 8.3.1). Natomiast przed ustawieniem oparcia do pozycji leżącej należy sznurki całkiem poluzować uwalniając możliwość maksymalnego rozłożenia się tapicerki (Zdj. 8.3.2).



Zdj. 8.3.1



Zdj. 8.3.2

8.4. Pasy pięciopunktowe

Pasy zostały fabrycznie zamontowane do wózka i nie należy ich demontować, ponieważ służą one do bezpiecznego przewożenia użytkownika, zapobiegają jego wyślizgnięciu się, a także są pomocne przy dodatkowej stabilizacji miednicy i tułowia użytkownika (Zdj. 8.4.1).

- **Regulacja:** przesunąć regulatory na szelkach w górę lub w dół i przesunąć ochraniacze. Aby wyregulować wysokość zamocowania pasów do oparcia na plecy, przetestować mocowanie szelek z mocowania niskiego na mocowanie wysokie lub odwrotnie.

- **Użytkowanie:** założyć użytkownikowi szelki z prawej i lewej strony i wepnij obie szelki w klamrę do zapinania pasów (Zdj. 8.4.2), która zamocowana jest na siedzisku. Aby ściągnąć pasy naciśnij przycisk na klamrze górnej (piersiowej) oraz dolnej, wypnij obie szelki z klamry i ściągnij szelki z prawej i lewej strony użytkownika. **Uwaga!** Każdorazowa zmiana kąta pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji długości pasów pięciopunktowych.



Zdj. 8.4.1



Zdj. 8.4.2

9. Wyposażenie dodatkowe

9.1. Barierka zabezpieczająca

Barierkę zabezpieczającą montuje się za pomocą tych samych mocowań, co stolik terapeutyczny, dlatego nie można użyć obu tych elementów równocześnie.

- **Montaż:** dwa plastikowe elementy (zatrzaski) montowane w miejscu zwężenia ramy (Zdj. 9.1). Otwórz dwie obejmy znajdujące się na barierce i równocześnie wsuń je na ramę i zatrzaśnij. Barierka będzie prawidłowo zamontowana dopiero wtedy, gdy barierka obejmie ramę zatrzaśniętą się. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik".

- **Demontaż:** odciągnij oba zatrzaski barierki znajdujące się na ramie i równocześnie wysuń barierkę.



Zdj. 9.1

9.2. Stolik terapeutyczny

Maksymalne obciążenie stolika wynosi 3kg.

- **Montaż:** dwa plastikowe elementy (zatrzaski) montowane w miejscu zwężenia ramy (Zdj. 9.2). Otwórz dwie obejmy (zatrzaski), równocześnie wsuń je na ramę i zatrzaśnij. Stolik będzie prawidłowo zamontowany dopiero wtedy, gdy zatrzaśnięte obejmie ramę zatrzaśniętą się. Świadczy o tym wyraźny dźwięk "klik".

- **Demontaż:** odciągnij oba zatrzaski znajdujące się na ramie i równocześnie wysuń stolik.



Zdj. 9.2

9.3. Pasy odwodząco-stabilizujące

Pasy odwodząco-stabilizujące (Zdj. 9.3.1) służą do dodatkowej stabilizacji miednicy i zapobiegają wyślizgnięciu się użytkownika z wózka. Zapnij na udach użytkownika, żeby jego miednica przylegała jak najbliżej oparcia na plecy.



Zdj. 9.3.1

- **Montaż:** w czterech miejscach - dwie tylne taśmy pasów zamocuj do tylnej ramy siedziska za pomocą klamr (Zdj. 9.3.2), dwie przednie taśmy pasów zamocuj do ramy wózka pod zwężeniem barierki (w bok) przekładając pas przez fabryczną pętelkę w taśmie (Zdj. 9.3.3)



Zdj. 9.3.2



Zdj. 9.3.3

- **Regulacja:** przesun regulatory na przednich taśmach pasów w górę lub w dół.
- **Użytkowanie:** Aby założyć pasy posadź użytkownika na zamontowane pasy, opleć nogę użytkownika i zapnij obie klamry pasów do obu taśm przednich. Aby ściągnąć pasy rozepnij obie klamry pasów od taśm przednich.

9.4. Wkładki zwężająco-spłycające

Wkładki służą do regulacji wewnętrznych wymiarów szerokości siedziska. Tapicerka wkładek jest zdejmowalna dzięki wszytemu zamkowi błyskawicznemu, co umożliwia jej wymianę lub czyszczenie.

- **Montaż:** montujemy w dowolnym miejscu wózka, na dowolnej wysokości dostosowując się do wskazań pacjenta. Montaż za pomocą rzepów na dolnej, tylnej i zewnętrznej stronie wkładki.
- **Demontaż:** oderwij rzep od tapicerki wózka.



Zdj. 9.4

9.5. Zagłówek

Zagłówek służy do stabilizacji głowy użytkownika oraz jest elementem zmiękczającym siedzisko na odcinku głowy (Zdj. 9.5). Tapicerka zagłówka jest zdejmowalna dzięki wszytemu zamkowi błyskawicznemu, co umożliwia jej wymianę lub czyszczenie.

- **Montaż:** montujemy za pomocą rzepa w tylnej części zagłówka na wybranej wysokości.
- **Demontaż:** oderwij rzep od tapicerki wózka.



Zdj. 9.5

9.6. Regulowany daszek z okienkiem

- **Elementy daszku:** stelaż daszku (przedni i tylny łuk), mechanizm regulacji otwierania daszku (prawy i lewy), dwa zatrzaski z czerwonymi przyciskami mocujące daszek do ramy, tapicerka daszku, oraz okienko z moskitierą z zamkiem błyskawicznym.

- **Montaż:** mocowaniem są dwa plastikowe elementy znajdujące się na zewnętrznych bokach górnej części oparcia na plecy. Ustaw oparcie na plecy w pozycji pionowej, nasuń oba zatrzaski daszku do mocowań na oparciu na plecy. Upewnij się, że we wnętrzu daszku zabezpieczony jest tapicerką element regulacji daszku (naciągnij tapicerkę i przełóż pętelkę na guziczek w narożniku daszku - Zdj. 9.6.1).



Zdj. 9.6.1

- **Demontaż:** naciśnij dwa czerwone przyciski na zatrzaskach mocujących daszek i wysunąć zatrzaski z mocowań na oparciu na plecy.

- **Użytkowanie:** Aby zmienić wielkość powierzchni daszka, chwyć za łuk przedni oraz łuk tylny stelaża daszka i przybliżając lub oddalając oba łuki od siebie lub do siebie, ustaw żadaną pozycję. Mechanizm regulacji wielkości powierzchni daszka zatrzaskuje się automatycznie.

Daszek posiada okienko z moskitierą zapewniające przewiew. (Zdj. 9.6.2).

Okienko otwiera się i zamyka za pomocą zamka błyskawicznego.



Zdj. 9.6.2

9.7. Torba turystyczna



Zdj. 9.7

Torba montowana jest na dwóch uchwytach, znajdujących się na wewnętrznej stronie ręczki do pchania wózka (Zdj. 9.7). Maksymalne obciążenie torby wynosi 2kg.

9.8. Kosz na zakupy

Kosz montowany jest w dolnej części wózka, poprzez owinięcie go na ramie wózka i zapięcie zamkiem błyskawicznym.

Maksymalne obciążenie kosza na zakupy wynosi 3kg.



Zdj. 9.8

9.9. Klin

Klin w przypadku określonych wskazań zapewnia odwodzenie (odchylenie na boki) kończyn dolnych użytkownika od jego środka ciała (Zdj. 9.9.1).



Zdj. 9.9.1

- **Montaż:** zapnij fragment pasa tapicerki na barierce i do niego przyłóż klin sklejać ze sobą rzepy. Można zamontować z przodu lub z tyłu pasa łączącego, dostosowując odległość do rozmiaru użytkownika. Następnie klin i pas owiń owijką zabezpieczając rzepy klin przed obsunięciem się (Zdj. 9.9.2).

- **Demontaż:** ściągnij owijkę, klin i pas tapicerki łączący ją z barierką, odczep i przełóż w specjalnie przygotowane miejsce w tapicerce siedziska.



Zdj. 9.9.2

9.10. Folia przeciwdeszczowa

Wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego - daszku.

- **Montaż:** nałóż folię od góry na daszek i załóż folię siedzisko wózka i podnóżek (Zdj. 9.10).

9.11. Rękawice zimowe

- **Montaż:** załóż dwie materiałowe obejmy, zapnij je rzepem na ręczce do pchania wózka, nałóż rękawice i zepnij (Zdj. 9.11).



Zdj. 9.11



Zdj. 9.10



Zdj. 9.12

9.12. Śpiwór na nogi

Wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego – barierek (Zdj. 9.12).

- **Montaż:** załóż śpiwór od dołu na podnóżek, a od góry przełóż przez barierkę zabezpieczającą i przypnij go do ramy wózka.

9.13. Moskitiera

Wymaga montażu do innego wyposażenia dodatkowego – daszku (Zdj. 9.13).

- **Montaż:** nałóż moskitierę od góry na daszek i zasłoń moskitierą siedzisko wózka i podnóżek.



Zdj. 9.13

9.14. Parasolka przeciwsłoneczna

- **Montaż:** zamontuj uchwyt parasolki do ramy wózka (Zdj. 9.14.2) i wsuń parasolkę w ten uchwyt.



Zdj. 9.14.1



Zdj. 9.14.2

10. Specyfikacja techniczna wózka Yeti

długość wózka	114,5 - 146 cm
szerokość wózka	66cm
wysokość wózka	117-138 cm
masa całkowita	24 - 28,6 kg
efektywna głębokość siedziska	31-45 cm
szerokość siedziska	28* / 43 cm
wysokość oparcia	65 - 85cm
szerokość oparcia	25*/42 cm
odległość podnóżka od siedziska / ilość regulacji	28,5 - 43,5 cm / 7 pozycji
długość wózka złożonego do transportu	110 cm
szerokość wózka złożonego do transportu	66cm
wysokość wózka złożonego do transportu	50 cm
nośność kosza	3 kg
nośność torby	2 kg
max. waga pacjenta	80 kg
wzrost pacjenta	130-175 cm
kąt płaszczyzny siedziska / ilość regulacji	ok 9,5°-29° / 5
kąt pochylenia oparcia / ilość regulacji	ok 3°-99° / 8 + leżąca
kąt podnóżka / ilość regulacji	ok 80°-180° / 6 pozycji

UWAGI:

*) wartości podane z wkładkami

Tolerancja wartości pomiarów +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

10.1. Skład surowcowy wózka

Stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne (PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

11. Dostawa i narzędzia

W oryginalnym opakowaniu powinny znaleźć się następujące elementy:

- Złożona rama wózka z siedziskiem i oparciem oraz koła,
- Wyposażenie dodatkowe zgodne z zamówieniem,
- Instrukcja obsługi wraz z kartą gwarancyjną,
- Klucz imbusowy,
- Klucz 10 mm.

Przed użyciem:

- a. sprawdź czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu (w przypadku uszkodzenia opakowania należy w obecności dostawcy rozpakować i sprawdzić czy żaden z elementów nie został uszkodzony),
- b. sprawdzić zgodnie ze specyfikacją zawartość przesyłki (w przypadku braku jakiegoś z komponentów należy skontaktować się ze Sprzedawcą).

Do montażu i demontażu wózka nie są wymagane żadne narzędzia.

Do regulacji wysokości podnóżka jest potrzebny śrubokręt krzyżakowy. Do regulacji wysokości oparcia oraz głębokości siedziska potrzebny jest klucz imbusowy.

12. Montaż i demontaż wózka

- Montaż wózka. Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest już wstępnie zmontowany.

Należy dokończyć montaż poprzez wykonanie następujących czynności:

- a) zamontować koła tylne na oś – patrz pkt. 7.6
- b) rozłożyć ramę wózka wraz z podnóżkiem regulując parametry:
 - załączyć / wyłączyć blokadę kierunku jazdy przednich kół – patrz pkt 7.5
 - wyregulować wysokość i kąt rączki do pchania wózka – patrz pkt 7.8
 - wyregulować głębokość siedziska – patrz pkt 7.11
 - ustawić kąt pochylenia siedziska – patrz pkt 7.12
 - wyregulować wysokość oparcia na plecy – patrz pkt 7.13
 - ustawić kąt pochylenia oparcia na plecy – patrz pkt 7.14
 - wyregulować długość pasów pięciopunktowych – patrz pkt 8.4
 - wyregulować wysokość podnóżka oraz kąt pochylenia podnóżka – patrz pkt 7.15
- c) wyregulować tapicerkę – patrz pkt 8.1, 8.2, 8.3
- d) zamontować odpowiednie wyposażenie dodatkowe oraz wyregulować parametry:
 - wyregulować szerokość użytkową siedziska (opcja dodatkowa:) – patrz pkt 9.4
 - wyregulować położenie zagłówka (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.5
 - założyć barierkę bezpieczeństwa lub stolik terapeutyczny (opcje dodatkowe) – patrz pkt 9.1, 9.2
 - wyregulować pasy odwodząco-stabilizujące (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.3
 - wyregulować daszek z okienkiem (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.6
 - założyć i wyregulować klin (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.9
 - założyć torbę turystyczną (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.7
 - założyć kosz na zakupy (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.8
 - założyć wybrane elementy wyposażenia dedykowanego porom roku:
 - śpiwór na nogi (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.12
 - rękawice zimowe (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.11
 - moskitiera (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.13
 - folia przeciwdeszczowa (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.10
 - parasolka (opcja dodatkowa) – patrz pkt 9.14
- Demontaż wózka. W celu demontażu wózka należy:
 - a) zdemontować wyposażenie dodatkowe
 - b) odpiąć tapicerkę (elementy boczne) z ram bocznych wózka
 - c) zablokować koła przednie, złożyć podnóżek i ramę wózka
 - d) odpiąć koła tylne
 - e) złożyć wózek zamykając go blokadą transportową.

13. Przygotowanie do użytkowania

Przed rozpoczęciem użytkowania wózka należy:

- Sprawdzić, czy rama wózka została prawidłowo rozłożona oraz czy mechanizm składania ramy został prawidłowo zamknięty (zablokowany).
- Sprawdzić, czy siedzisko zostało prawidłowo zamontowane do ramy wózka
- Prawidłowo dokonać wszystkich regulacji i dopasować wózek do potrzeb użytkownika, w tym ustawić odpowiednią głębokość siedziska terapeutycznego i wysokość oparcia na plecy, odpowiednie pochylenie

siedziska terapeutycznego i pochylenie oparcia na plecy, ustawić odpowiednie pochylenie podnóżka, wyregulować odpowiednią siłę naciągu pasów na oparciu i na siedzisku, sprawdzić długość pasów pięciopunktowych. Sprawdzić, czy wszystkie elementy regulacyjne są właściwie osadzone i zabezpieczone.

- Sprawdzić, czy tapicerka wózka jest sucha.
- Zabezpieczyć użytkownika wszelkimi dostępnymi elementami stabilizującymi, takimi jak: pasy pięciopunktowe, wkładki zwężająco-splątujące, pasy odwodząco-stabilizujące, klin, podnóżek, taśmy podnóżka na stopy, barierka zabezpieczająca lub stolik terapeutyczny. Ma to na celu zabezpieczenie użytkownika przed wypadnięciem i wysunięciem się z wózka oraz zabezpieczenie stóp użytkownika przed spadnięciem z podnóżka. Upewnić się, że wykonane wcześniej wszystkie regulacje są dla użytkownika odpowiednie i bezpieczne.
- Zadbaj, żeby użytkownik nie był umieszczony w wózku bez odzieży osłaniającej ciało w miejscach kontaktu z tapicerką wózka. Ma to na celu przeciwdziałanie otarciom ciała użytkownika oraz względy higieniczne użytkownika.
- W przypadku użytkowników mających problem z trzymaniem moczu, należy położyć na siedzisko wózka specjalną ceratę, którą można nabyć w aptekach lub sklepach medycznych.
- W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. należy zadbać, żeby były one dobrze zabezpieczone przed wypadnięciem, wyrwaniem, zaciśnięciem oraz nie przeszkadzały podczas użytkowania wózka.

14. Użytkowanie wózka

14.1. Przenoszenie wózka

Najlepszym sposobem przenoszenia wózka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kół (Zdj. 14.1).

W przypadkach, kiedy nie jest to możliwe (np. w celu transportu wózka w samochodzie), to ze względów bezpieczeństwa, wózek można podnosić i przenosić oburącz po uprzednim demontażu wyposażenia dodatkowego w celu zmniejszenia ciężaru do przenoszenia i złożeniu go. Podczas przenoszenia lub podnoszenia ramy wózka należy zachować szczególną ostrożność. Ramę należy przenosić po złożeniu i założeniu blokady transportowej.

Nie należy używać do przenoszenia wózka wyposażenia dodatkowego – grozi jego uszkodzeniem.



Zdj.14.1

14.2. Wsiadanie i zsiadanie z wózka inwalidzkiego

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wózka inwalidzkiego należy umieścić wózek jak najbliżej stabilnego i bezpiecznego miejsca, na które użytkownik będzie się przesiadał. Po upewnieniu się, że hamulce tylne są załączone, a podnóżek został zdemontowany w celu uniknięcia stawania na nim, użytkownik może zostać umieszczony w wózku.

Nie wolno stawać na płycie podnóżka, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, urazu użytkownika i ryzyko uszkodzenia produktu.

Należy zwrócić uwagę, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wózka, dziecko i żadna inna osoba nie stawały na podnóżku, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem i urazem użytkownika!

14.3. Prawidłowa pozycja w wózku inwalidzkim

Z powodów bezpieczeństwa i zdrowotnych zaleca się, żeby użytkownik miał ułożone miednicę i plecy jak najbliżej oparcia, na ile to możliwe, w celu równomiernego podparcia kręgosłupa (optymalne podparcie wszystkich części kręgosłupa, tak by nie powstawała wolna przestrzeń).

Uda powinny mieć zapewnione podparcie na jak największej powierzchni, na całej swojej długości, czemu służy dopasowanie głębokości siedziska wózka (patrz pkt. 7.11), a stopy należy oprzeć na płycie podnóżka (patrz pkt 7.15), co zapobiega zsuwaniu się, utrzymuje optymalne napięcie mięśni nóg i przenosi część ciężaru z wyższych partii ciała.

UWAGA! Z uwagi na duże możliwości regulacyjne wózka, podczas regulacji kątowej siedziska i regulacji kątowej oparcia na plecy, istnieje możliwość ustawienia takiej pozycji, w której głowa użytkownika znajdzie się poniżej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyż mogłoby to doprowadzić do niebezpieczeństwa zachłyśnięcia lub zakrztuszenia się użytkownika.

14.4. Jazda na wózku inwalidzkim

Podczas użytkowania wózek zawsze należy trzymać za rączkę do pchania wózka, aby nie dopuścić do bezwładnego toczenia się wózka. Zwolnij hamulec centralny jednocześnie trzymając rączkę do pchania wózka i popychaj wózek w bezpiecznym kierunku.

14.5. Poruszanie się po powierzchniach pochyłych

Podczas pokonywania wzniesień lub podjazdów zawsze należy ustawiać wózek przodem do kierunku jazdy. Ogranicz prędkość na powierzchniach pochyłych i poruszaj się jak najwolniej. Osoba prowadząca wózek musi dysponować odpowiednią siłą pozwalającą kontrolować stabilność wózka inwalidzkiego.

Zawsze należy pamiętać o tym, że położenie środka ciężkości wózka ulega zmianie przy pokonywaniu nierówności lub pochyłości w terenie. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność i asekurować wózek.

Podczas korzystania z podjazdów należy upewnić się, że podjazd jest odpowiedni, że koła wózka są wystarczająco wysokie do pokonania podjazdu, że rama wózka nie będzie się stykała z podjazdem oraz należy zapewnić pomoc drugiej osoby, ponieważ istnieje ryzyko przewrócenia wózka, uszkodzenia produktu i urazu użytkownika.

14.6. Pokonywanie progów lub krawężników

Podczas pokonywania małych przeszkód (niewielkie progi, małe krawężniki itp.), należy przyblokować stopą stopkę przechyłową oraz rączkę do pchania wózka w kierunku w dół i do siebie, żeby unieść przednie koła wózka i ostrożnie wjechać przednimi kołami na przeszkodę. Następnie powoli pociągnąć rączkę do pchania wózka do góry, w kierunku od podłoża, żeby unieść tylne koła wózka i ostrożnie wjechać tylnymi kołami na przeszkodę.

14.7. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

- Zdemontuj z wózka wszystkie akcesoria i przechowuj je w bezpiecznym miejscu. Złóż wózek i umieść go w bagażniku.

Jeśli zdemontowany wózek nie znajduje się w bagażniku samochodu oddzielnym od kabiny pasażerów, to należy dokładnie umocować ramę wózka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu można skorzystać z nieużywanych pasów bezpieczeństwa.

- W celu przewiezienia wózka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociągi, tramwaje, autobusy, samoloty, statki, itp. należy zapytać osoby odpowiedzialne za transport w tych środkach komunikacji, o warunki bezpiecznej podróży do miejsca docelowego z wózkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.



Wózków z rodziny Yeti nie należy używać jako siedziska do przewożenia dziecka w pojeździe.

14.8. Czyszczenie i pielęgnacja

Tapicerkę można prać tylko ręcznie w temperaturze do 30°.

Plamy powinny być usunięte natychmiast po powstaniu na powierzchni wózka.

UWAGA! Nie wolno czyścić środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czystości Producent nie ponosi odpowiedzialności.

Upewnij się, że produkt jest zawsze suchy przed użyciem.

W przypadku stosowania detergentów dedykowanych do tego typu materiału – postępować zgodnie z instrukcją stosowanego środka.



Prać tylko ręcznie



Nie wybielać



Nie suszyć w suszarce
bębnowej



Suszyć w pozycji
poziomej



Nie prasować

15. Przechowywanie wózka

Wózek czysty należy przechowywać w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temp 0-35°C. W przypadku przechowywania długotrwałego należy dodatkowo wykonać czynności opisane w pkt. 16 „co każdy jeden miesiąc”.

16. Serwis i przeglądy okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wózka należy regularnie i dokładnie poddawać go niżej opisanym przeglądom i czynnościom serwisowym.

W sytuacji, gdy użytkownik wózka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzić wymienionych czynności, powinien oddać wózek do specjalistycznego punktu serwisującego wózki inwalidzkie lub bezpośrednio do Producenta, który we właściwy sposób dokona przeglądu i niezbędnych czynności serwisowych. Czynności te mogą być dodatkowo płatne.

UWAGA! Producent odpowiada za wady lub uszkodzenia techniczne wózka powstałe wyłącznie przy prawidłowej eksploatacji wózka. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie wózka spoczywa na Producencie tylko w przypadku ścisłego stosowania się do wszystkich zaleceń Producenta.

UWAGA! Producent ponosi odpowiedzialność za właściwe funkcjonowanie wózka wyłącznie w przypadku zastosowania w nim oryginalnych części i oryginalnego wyposażenia dodatkowego.

Wszelkie naprawy należy przeprowadzać w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz pkt 19) lub bezpośrednio u Producenta. Naprawy wózka wykonywane przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producenta spowodują utratę gwarancji. Producent nie odpowiada za uszkodzenia ciała lub zniszczenie produktu jakie mogą być konsekwencją naprawy wykonywanej przez osoby inne niż autoryzowany Serwis lub Producent.

Czynności serwisowe należy wykonywać:

- **Każdorazowo przed użyciem wózka**
 - Kontrola sprawności hamulca centralnego - Po załączeniu hamulca centralnego oba tylne koła wózka powinny być zablokowane i nie mogą się obracać.
 - Kontrola zamocowania elementów konstrukcyjnych - Należy skontrolować wszystkie mechanizmy wózka i jego elementy ruchome, a w szczególności należy zwrócić uwagę na: prawidłowe zamontowanie siedziska terapeutycznego z oparciem na plecy do ramy wózka, prawidłowe zamontowanie wszystkich czterech kół, prawidłowe funkcjonowanie pięciopunktowych pasów bezpieczeństwa, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej siedziska, prawidłowo zablokowany mechanizm regulacji kątowej oparcia oraz prawidłowe zamontowanie podnóżka.
 - Kontrola stanu ogumienia - Należy sprawdzić czy ogumienie wszystkich czterech kół nie jest uszkodzone lub zużyte.
 - Kontrola stałych elementów ramy, siedziska z oparciem i stelaża podnóżka - Należy wzrokowo skontrolować stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogą być uszkodzone lub pęknięte.
- **Co każdy jeden miesiąc**
 - Czyszczenie wózka
 - Kontrola wizualna elementów ruchomych, łożysk, mechanizmy regulacyjne - nasmarować smarem silikonowym.
 - Kontrola wszystkich połączeń śrubowych pod kątem luzów.

17. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju.

18. Zgodność z wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych

Wyrób Medyczny klasy I zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobów medycznych. Na wyrób producent wystawił stosowną deklarację zgodności, która znajduje się na stronie www.mywam.eu

19. Lista autoryzowanych punktów serwisowych

POLSKA

MyWam sp. z o.o.

ul. Wiosny Ludów 91, 40-373 Katowice, Polska

tel: +48 32 733 11 31

strona internetowa: www.mywam.eu

adres e-mail: serwis@mywam.eu

20. Karta Gwarancyjna

Seria i numer:

Data zakupu: - -

Pieczętka i podpis sprzedawcy:

.....
.....
.....

Warunki gwarancji

- Sprzedawca udziela nabywcy na zakupiony wózek gwarancji, na okres 24 miesięcy, licząc od dnia zakupu.
- **Nabywca reklamujący wózek powinien dostarczyć wózek do Sprzedawcy w opakowaniu, czysty (wolny od plam, dodatkowego wyposażenia nie należącego do wózka, wilgoci, sierści itp.) wraz z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wózka.**
- **Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesyłki wózka i jego elementów nie podlegają naprawom gwarancyjnym.**
- Reklamujący nie może żądać gratyfikacji, jeżeli niewłaściwie oznakuje lub nieprawidłowo ubezpieczy przesyłkę wózka i jego elementy.
- Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy wózka.
- Czynności przewidziane w instrukcji, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, nie mogą być wykonane w ramach naprawy gwarancyjnej.
- Użytkowanie wózka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszą instrukcją obsługi lub niezgodne z zasadami prawidłowej eksploatacji powoduje utratę gwarancji.
- Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wózka powoduje utratę gwarancji (w danym obszarze zmian lub całości).
- Uszkodzenia wózka powstałe na skutek: niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwej konserwacji, nieprawidłowego przechowywania wózka, uszkodzeń mechanicznych oraz naturalnego ścierania i zużywania się części (np. tapicerka, koła) nie podlegają gwarancji.
- Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zakładach serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przeróbki wózka powoduje utratę gwarancji.
- **Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że posiada: wpisaną datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmową Sprzedającego, podpis Sprzedającego, rodzaj i numer fabryczny wózka.**
- Karta gwarancyjna jest ważna pod warunkiem, że nie zawiera skreśleń i poprawek.
- Producent wózka prowadzi w jego siedzibie odpłatny serwis pogwarancyjny.
- W sprawach nieuregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Polska).
- Wszelkie sprawy związane z gwarancją i reklamacją wózka proszę kierować do Sprzedawcy.

21. Notatki