



PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

KATALOG WÓZKÓW SPECJALNYCH SPACEROWYCH

www.mywam.pl



UWAGA: Informacje zawarte w niniejszej broszurze mają charakter wyłącznie poglądowy oraz edukacyjny w związku z czym: 1) nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów prawa handlowego, 2) nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji dotyczących podjęcia lub niepodjęcia leczenia lub innych procedur medycznych. Interpretacji powinien dokonać lekarz specjalista. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w wyrobach.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą



PRODUCENT: MyWam sp.z o.o.
PODMIOT PROWADZĄCY REKLAMĘ: MyWam Polska sp. z o.o.

CE MD WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

Wózek spacerowy specjalny YETI to drobiazgowo zaprojektowana odpowiedź na potrzeby starszych dzieci o masie ciała do 80 kg i wzroście do 175cm. Jego solidna konstrukcja oraz szeroki zakres regulacji parametrów pozwalają na zaspokojenie potrzeb użytkownika na najwyższym możliwym poziomie. System ROSNĘ Z TOBĄ pozwala na dopasowanie wymiarów wózka do wzrostu dziecka, dzięki czemu będzie Wam służył przez wiele lat.

Kątowa regulacja siedziska i oparcia pozwala na dostosowanie optymalnej pozycji spacerówki do potrzeb dziecka. Ponadto różnorodność praktycznych akcesoriów oraz mechanizm szybkiego składania znacznie ułatwiają codzienne użytkowanie.

Zawieszenie YETI z pełnymi żelowymi kołami, centralnym hamulcem, amortyzacją na tylnych kołach, stopką przechyłową i blokadą kierunku jazdy gwarantuje łatwą i płynną jazdę. Dodatkowym atutem wózka jest nowoczesny i praktyczny design.

WSKAZANIA:

paraliż i niedowład kończyn dolnych różnego pochodzenia, paraliż i niedowład tułowia, osłabienie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej pozycji ciała, najczęściej spowodowane takimi stanami jak porażenie mózgowe lub przepuklina oponowo-rdzeniowa.

PRZECIWWSKAZANIA:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



wersje kolorystyczne.

  **TAPICERKA**
syntetyczna

  **RAMA**
lakierowana / mat

  **TAPICERKA**
syntetyczna

  **RAMA**
lakierowana / mat



To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą

funkcje. *bezpieczeństwo i komfort*

FUNKCJA KOŁYSKI

łatwe dopasowanie



9,5°-29°

5 pozycji

REGULACJA OPARCIA

szeroki zakres dopasowania



3°- 99°

8 pozycji

REGULACJA PODNÓŻKA

szybkie i łatwe dopasowanie



80°- 180°

6 pozycji

REGULACJA PARAMETRÓW

wkładki zwężające



Zestaw zwężający siedzisko składa się z czterech niezależnych wkładek wyposażonych w rzepy. Dzięki możliwości montowania ich na dowolnej wysokości i pod dowolnym kątem możemy zapewnić dziecku optymalną pozycję w wózku oraz komfortową podróż.

ROSŃĘ Z TOBĄ

regulacja parametrów



Zaletą wózka YETI jest system „ROSŃĘ Z TOBĄ”. Możliwość dopasowania głębokości siedziska do 45 cm, wysokości oparcia do 85 cm i możliwość obniżenia podnóżka do 43,5cm poniżej poziomu siedziska znacząco zwiększa zakres dopasowania, przez co wózek może Wam posłużyć przez długie lata.

POZYCJA LEŻĄCA

zastosowanie wielu regulacji



Dzięki możliwości dostosowania kąta pochylecia siedziska, oparcia oraz podnóżka możliwe jest ustawienie wózka w pozycji leżącej. Dzięki temu krótka drzemka dziecka jest możliwa niemal w każdym miejscu i sytuacji.

FARTUCHY PRZECIWWIETRZNE

wielofunkcyjna tapicerka



YETI posiada możliwość regulowania bocznych fartuchów przeciwwietrznych, stanowiących dodatkową ochronę przy niesprzyjającej pogodzie.

SKŁADANA RAMA

łatwy transport i przechowywanie



Konstrukcja ramy wózka umożliwia jego szybkie złożenie w celu przygotowania do transportu lub przechowywania.

WSPARCIE JAZDY

kompleksowy układ jezdny



Wózek YETI posiada wiele udogodnień w prowadzeniu, takich jak blokada kierunku jazdy na przednich kołach, centralny hamulec, amortyzacja tylnych kół, a także stopka przechyłowa.

funkcjonalne akcesoria. w praktyce



Daszek z okienkiem



Pasy 5-punktowe



Zagłówek

Wkładki zwężające



Pasy odwodząco - stabilizujące



Klin



Łatwy system montażu kół



Blokada kierunku jazdy




akcesoria. *bogate możliwości wyposażenia*



wkładki zwężające



zagłówek

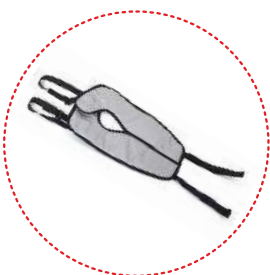

pasy odwodząco - stabilizujące



klin



daszek z okienkiem



barierka zabezpieczająca



kosz na zakupy



torba turystyczna



parasolka przeciwsłoneczna



rękawice zimowe



stolik terapeutyczny



śpiwór na nogi



moskitiera



folia przeciwdeszczowa

parametry.

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

 szerokość siedziska 28* / 43 cm

 głębokość siedziska 31 - 45 cm

 wysokość oparcia 65 - 85 cm

 regulacja podnóżka 28,5 - 43,5 cm

 wymiary po złożeniu: L 110 x W 66 x H 50 cm

 waga wózka 24 - 28,6 kg

 długość wózka 114,5 - 146 cm

 wysokość wózka 117 - 138 cm

 szerokość wózka 66 cm

PARAMETRY UŻYTKOWNIKA

 wzrost 130 - 175 cm

 max waga 80 kg


* z wkładkami zwężającymi



MyWam Polska Sp. z o.o.
ul. Szczecińska 10
41-516 Chorzów
NIP: 627 277 18 61

biuro@mywam.pl

KONTAKT W REGIONACH

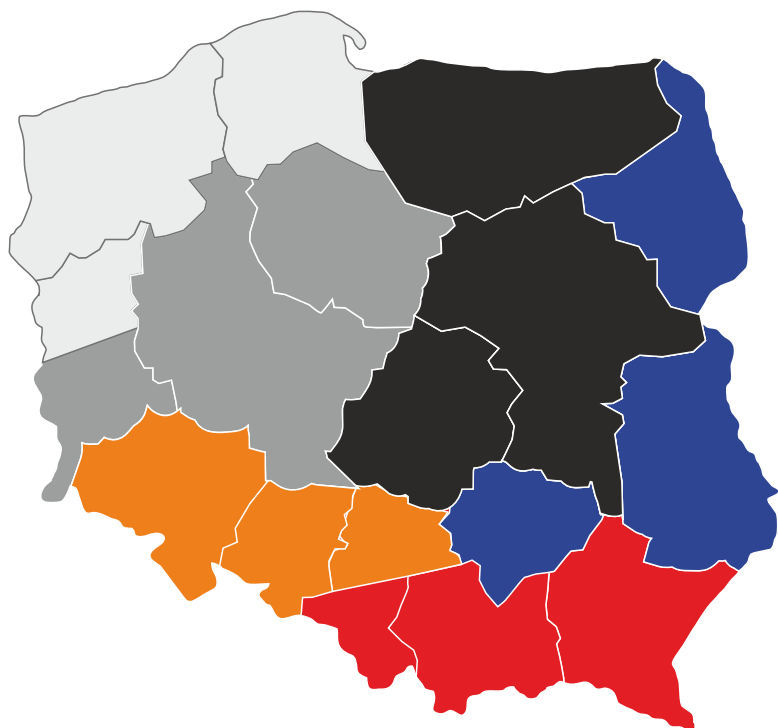

kom.: +48 533 220 169

województwa:

Pomorskie, Zachodniopomorskie, Lubuskie.

kom.: +48 531 790 664

województwa:

Kujawsko-Pomorskie, Wielkopolskie, Lubuskie.

kom.: +48 535 555 694

województwa:

Warmińsko - Mazurskie, Mazowieckie, Łódzkie.

kom.: +48 535 767 813

województwa:

Lubelskie, Podlaskie, Świętokrzyskie.

kom.: +48 798 026 502

województwa:

Dolnośląskie, Opolskie, Śląskie.

kom.: +48 535 555 297

województwa:

Śląskie, Podkarpackie, Małopolskie, Świętokrzyskie.