

alfa

**WÓZEK
INWALIDZKI
SPECJALNY
DLA DZIECI**



INFORMACJE OGÓLNE

Wózek inwalidzki specjalny **ALFA** dedykowany jest dzieciom w przedziale wzrostu **100 – 150 cm** i maksymalnej wadze **55 kg**.

Jego rozbudowana i solidna konstrukcja, składająca się z ramy, siedziska oraz osobnego oparcia, czyni go niezwykle wytrzymałym i w dużej mierze ułatwia transport urządzenia.

Posiada on również szeroki wachlarz regulacji dający możliwość płynnej zmiany parametrów siedziska (**głębokość od 30 do 40 cm**) oraz oparcia (**wysokość od 59 do 74 cm**).

W połączeniu z możliwością dopasowania kąta pochylenia w obrębie oparcia, siedziska i podnóżka oraz zainstalowania regulowanych pelot otrzymujemy kompleksowy sprzęt zapewniający maksymalny komfort, bezpieczeństwo i funkcjonalność na lata.

Prócz zalet związanych z funkcjonalnością **ALFA** może również pochwalić się nowoczesnym wyglądem, co czyni go jeszcze bardziej uniwersalnym i atrakcyjnym.

**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYTKOWANIA LUB ETYKIETĄ.**

WSKAZANIA

- porażenia i niedowłady kończyn dolnych różnego pochodzenia
- porażenia i niedowłady tułowia
- osłabienie mięśni posturalnych, odpowiedzialnych za utrzymanie
- prawidłowej pozycji ciała
- mózgowe porażenie dziecięce
- przepuklina oponowo – rdzeniowa
- dystrofie mięśniowe

PRZECIWWSKAZANIA

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzącej i/lub pionizacji biernej, regulację wózka należy skonsultować z fizjoterapeutą lub lekarzem prowadzącym.



FUNKCJA KOŁYSKI



REGULACJA POCHYLENIA OPARCIA



REGULACJA POCHYLENIA PODNÓŻKA



POZYCJA LEŻĄCA

KONSTRUKCJA

Konstrukcja wózka specjalnego ALFA złożona jest z dwóch elementów: ramy z siedziskiem oraz oparcia. Oparcie mocujemy do ramy z siedziskiem dzięki prostemu mechanizmowi mocowania (szczegóły zawarte w instrukcji).

UWAGA! Przed posadzeniem dziecka w wózek należy upewnić się, że mechanizm został prawidłowo zablokowany po obu stronach wózka chwytając za oparcie i delikatnie potrząsając nim. Poprawnie zamontowane oparcie pozostanie na swojej pozycji.



MODYFIKACJA PARAMETRÓW

Przy pomocy wybranych akcesoriów i kilku nieskomplikowanych czynności możemy w prosty sposób dostosować wózek specjalny **ALFA** do potrzeb dzieci, których wzrost i waga mieszczą się w przypisanych dla modelu parametrach (**wzrost 100 – 150 cm, waga do 55 kg**).

Wózek posiada regulację pelot biodrowych i piersiowych (1), możliwość dostosowania wysokości zagłówka (2), wysokości oparcia (3), jak również możliwość wydłużenia siedziska (4) oraz dostosowanie podnóżka (5) pod indywidualne potrzeby dziecka.



AKCESORIA



**ELEMENTY BOCZNE
OPARCIA**



**REGULOWANE
PELOTY**



BARIERKA



**PASY ODWODZĄCO-
STABILIZUJĄCE**



**PASY
PIĘCIOPUNKTOWE**



KLIN Z REGULACJĄ



**STOLIK
TERAPEUTYCZNY**



**REGULOWANA
BUDKA Z OKIENKIEM**



ZAGŁÓWEK



**PLECAK
TURYSTYCZNY**



KOSZ NA ZAKUPY



**PARASOLKA
PRZECIWSŁONECZNA**



MOSKITIERA



**FOLIA
PRZECIWDESZCZOWA**



ŚPIWÓR

PARAMETRY TECHNICZNE WÓZKA

szerokość siedziska: 27 – 32 cm*, 41 cm**
 głębokość siedziska: 30 – 40 cm
 wysokość oparcia: 59 – 74 cm
 szerokość oparcia: 27 – 32 cm*, 40 cm**

masa całkowita: 26 kg
 długość wózka: 100 – 145 cm
 wysokość wózka: 107 – 128 cm
 szerokość wózka: 66 cm

odległość podnóżka od siedziska/ilość regulacji: 30 – 40 cm, 8 pozycji

WAŻNE! Wybór wsparcia ortopedycznego właściwego dla konkretnego schorzenia i stanu pacjenta musi zostać dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.